

Gebruiksaanwijzing



Montage van Rug rollator RO4RUG

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	23-10-2020	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016
V.2.0	31-03-2025	R. Keuning	Tweede uitgave QR code, verklaring, foto, MDR

Producttype + artikelnummer:

Premis Provo Rollator – onderdeel – accessoire. Rug voor de Premis rollator RO4143

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: RO4RUG
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874319600
Inbegrepen in de verpakking van dit product:
 1 Ruggesteun
 2 Bevestigingsklemmen
 1 Inbussleutel
 2 Verlooppingen met Stokkenklem



Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	31-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Montage van Rug rollator RO4RUG

1. Installeren voor gebruik:

Demonteer de bovenklem van de stokhouder.
Deze is niet nodig bij gebruik van de ruggensteun



2. Monteer de bevestigingsklemmen tussen fixatie handel en bovenste stang (zie foto)draai deze nog niet vast



3. Plaats de rugsteun in de klemmen (hoogte afhankelijk van de persoon) en draai deze vast met de meegeleverde inbusbout



4. Monteer de stokhouder, gebruik hiervoor de 2 verloopringen En monteer deze op de ruggensteun +/- 2 cm van de onderkant. Zie foto



Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:

- Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
- Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
- Op de rugsteun zit een  sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer () en de productiedatum (). **VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**

2. Garantie bepalingen:

- Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
- De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	31-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Montage van Rug rollator RO4RUG

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.



Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745
 NEN: EN:IEC 62366-1:2015
 NEN: EN:ISO 15223-1:2016
 NEN: EN:ISO 14971-1:2015
 NEN: EN:ISO 11199-2:2021
 CEN: NL:1985:1998
 NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	31-03-2025	Auteur:	R.Keuning