

Gebruiksaanwijzing



Dienblad Provo rollator RO4DBP

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	06-05-2026	R.Keuning	Eerste uitgave

Producttype + artikelnummer:

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geassocieerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: RO4DBP
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874315305

Variaties:

Dienblad Provo rollator	RO4DBP
-------------------------	--------

Past dit product bij u?

Het Dienblad dat u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke dienblad geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Buitenmaat: 39,5 x 25,7 x 3,5 cm Binnenmaat: 32,2 x 23,6 x 2 cm
Productgewicht:	295g

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

Dienblad voor Premis Provo rollator.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1x Premis Provo Dienblad (RO4DBP)

Beoogd gebruik van het product:

Dit dienblad voor rollators is ontworpen voor gebruik op de Premis Provo rollator(s). Dankzij dit dienblad kunt u gemakkelijk kleine voorwerpen met u meebrengen als u met de rollator loopt. Denk bijvoorbeeld aan een heerlijk kopje koffie of thee die u zelfstandig naar uw visite kunt brengen, terwijl zij lekker op de bank zitten. Uw zelfstandigheid en gastvrijheid behouden is dankzij dit dienblad zeer gemakkelijk. Uiteraard is het dienblad ook geschikt om uw eigen drinken mee te nemen, of een ander voorwerp.

Het dienblad is gemaakt van doorzichtig kunststof – vrij van BPA en Ftalaten – zodat deze niet storend oogt op uw rollator. Dankzij de gaatjes in de zitting en de pootjes van het dienblad, schuift het dienblad niet onbedoeld van het zitje af. Hiermee voorkomt u knoeien en ongelukjes. Het dienblad blijft makkelijk afneembaar door de brede rand die u goed kunt vastpakken.



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Diemblad Provo rollator RO4DBP

Voor welke rollator is dit dienblad geschikt?

Dit dienblad wordt standaard meegeleverd met alle **Premis Provo 2e generatie rollators** voorzien van een PU zitting met 4 gaten voor de pootjes van het dienblad. Hieronder vallen ook de XL rollators en Klein Volwassenen rollators met zitbreedte 43 cm, zolang ze het juiste zitje hebben.

Daarnaast kunt u dit dienblad gebruiken in combinatie met het dienbladframe voor op een Delta Rollator. Zo kunt u ook met uw Delta Rollator gemakkelijk uw gasten en uzelf bedienen.

Aandachtspunten bij gebruik

Let wel goed op met warme objecten in combinatie met dit dienblad. U dient een schoteltje te gebruiken onder hete kopjes. Vermijd het gebruik van het dienblad voor het dragen van hete objecten waar mogelijk. Gebruik het dienblad niet als snijplank! Daarvoor is het kunststof te dun en zacht, waardoor het zal barsten of krassen.

Onderhoud van het product:

Het dienblad is niet geschikt voor in de vaatwasser, omdat de hete stoom en het hete water het dienblad zullen vervormen. Wast u het dienblad dan ook met de hand af met niet te heet water. Reinig het dienblad na ieder gebruik, om vlekken en kringen van vloeistoffen te voorkomen.

Installeren

Leg het dienblad op het zitje. Let erop dat de pootjes van het dienblad in de gaatjes in de zitting vallen, zodat het dienblad niet verschuift.

Technische specificaties:









Gebruikte materialen:	Doorzichtig kunststof
Productafmetingen (lxbxh):	Buitenmaat: 39,5 x 25,7 x 3,5 cm Binnenmaat: 32,2 x 23,6 x 2 cm
Productgewicht:	295 g

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn op het dienblad bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf, bij normaal gebruik.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-05-2026	Auteur:	R.Keuning




Gebruiksaanwijzing



Diemblad Provo rollator RO4DBP

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

 Fabrikant	
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745
 NEN: EN:IEC 62366-1:2015
 NEN: EN:ISO 15223-1:2016
 NEN: EN:ISO 14971-1:2015
 NEN: EN:ISO 11199-2:2021
 CEN: NL:1985:1998
 NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-05-2026	Auteur:	R.Keuning