

Gebruiksaanwijzing



Toiletverhoger TO2278

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	05-06-2025	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Producttype + artikelnummer:

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands
Product: TO2278
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08436548964078



Omschrijving van het product:
 Toiletverhoger zonder deksel

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

(Productafmetingen)	36 cm breed, 40 cm diep, hoogte 5, 10 of 15 cm (afhankelijk van model)
(Productgewicht:)	0,81-1,44 kg (afhankelijk van model)
(Maximaal gebruikersgewicht:)	120 kg.
(Materiaal)	Plastic
(Hoogte zitting)	5, 10 of 15 cm (afhankelijk van model)

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Aanbevolen lengte

1. Meet de lengte van je onderbeen en tel daar 5 cm bij op. In het voorbeeld is dat: 48 + 5 cm = 53 cm.
2. Meet de hoogte van je toiletpot. Tel de bril en het deksel niet mee.
3. Bereken het verschil tussen de lengte van je been en de hoogte van je toilet.
4. In het voorbeeld is dat: 53 - 43 = 10 cm.
5. Dit betekent dat je een toilet met een verhoging van 10 cm nodig hebt. Als je een getal tussen 2 hoogtes getal hebt berekent, rond je het gewoon af naar boven!

Variaties:

Toiletverhoger 5 cm zonder deksel	TO227805
Toiletverhoger 10 cm zonder deksel	TO227810
Toiletverhoger 15 cm zonder deksel	TO227815

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Toiletverhogers moeten altijd worden gebruikt voor het beoogde doel. Ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
2. Breng geen wijzigingen (mechanische aanpassingen) aan dit product aan om de veiligheid ervan niet in gevaar te brengen.
3. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	05-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Toiletverhoger TO2278

Inbegrepen in de verpakking van dit product: (afhankelijk van model)

1 x Toiletverhoger zonder deksel

Beoogd gebruik van het product:

1. Ondersteuningsproduct voor het tillen, bevestigd aan het toilet.
2. Het biedt stabiliteit en vergemakkelijkt de evacuatie van mensen met een beperking of beperkte mobiliteit.
3. Het gebruik ervan wordt ook aanbevolen na een heupoperatie.

Installeren voor gebruik:

1. Verwijder de bestaande toiletbril van het toilet.
2. Plaats de bouten in de bestaande gaten. De positie ervan kan worden aangepast.
3. Controleer voor gebruik of het verhoogde toilet goed vastzit tegen de toiletput.

Gebruik:

1. Controleer voor elk gebruik of het product in perfecte staat is.
2. Gebruik het product niet in geval van een zichtbaar defect. In geval van ontbrekende, slecht passende of beschadigde onderdelen. Vraag uw distributeur om advies.
3. Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten.
4. Het niet opvolgen van de instructies, waarschuwingen en opmerkingen in de gebruikershandleiding kan lichamelijk letsel bij u of anderen veroorzaken, of schade aan het product.
5. Breng geen wijzigingen (mechanische aanpassingen) aan het artikel aan om de gebruiksveiligheid niet in gevaar te brengen.
6. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.



Contra-indicaties van het product:

Het gebruik van het verhoogde toilet wordt afgeraden voor mensen met sterke waarnemingsstoornissen, evenwichtsstoornissen of een onvermogen om te zitten

Levensduur

De levensduur van dit product wordt beïnvloed door de gebruiksomstandigheden en de regelmaat van het onderhoud. Door de in deze gebruiksaanwijzing vermelde aanwijzingen te respecteren, is het mogelijk om het artikel langer dan 24 maanden in perfecte staat te houden.

Reiniging van het product:

1. Droog het altijd na gebruik en/of schoonmaken. Het frame en schroeven zijn gemaakt van staal, dus reinigen zonder goede daaropvolgende droging kan leiden tot het verschijnen van roest.
2. Gebruik voor het schoonmaken een natuurlijk reinigingsmiddel en heet water.
3. Gebruik geen schurende producten.
4. Gebruik geen materialen die het frame kunnen krassen.
5. Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur wanneer het niet in gebruik is.

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:

a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	05-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Toiletverhoger TO2278

- b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
- c. Op de toiletverhoger zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (M).
VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**

2. Garantie bepalingen:

- a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
- b. De garantietermijn van het product op productiefouten bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
- c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij, het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

Distributeur
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands
 



Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745
NEN: EN:IEC 62366-1:2015
NEN: EN:ISO 15223-1:2016
NEN: EN:ISO 14971-1:2015
NEN: EN:ISO 11199-2:2021
CEN: NL:1985:1998
NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	05-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Toiletverhoger TO2278

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	05-06-2025	Auteur:	R. Keuning