

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450W Urinefles wandrek

### Revisies

| Revisie | Datum<br>(dd-mm-jjjj) | Auteur     | Beschrijving van de wijziging                           |
|---------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| V.1.0   | 26-05-2021            | R. Keuning | Eerste uitgave                                          |
| V.2.0   | 23-09-2025            | R. Keuning | Tweede uitgave Manuf, Verklaring, garantiebepaling, MDR |

### Producttype + artikelnummer:

Urine fles wandrek  
UR5450W

**Manufacturer's name:** Premis Medical BV  
**Business:** de Nort 20  
3931 NG Woudenberg  
The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

**Product:** UR5450W  
**Classification:** Class 1 = light risk class  
**SRN number:** NL-MF-000005783  
**Udinummer:** 08718874304002, 08718874304101, 08718874304200, 08718874304309, 08718874304408, 08718874304903, 08718874304507, 08718874304606, 08718874304705, 08718874304804

### Variaties:

|                         |            |                          |           |
|-------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Geschikt voor 1 fles    | ON5450WV01 | Geschikt voor 6 flessen  | ON5450W06 |
| Geschikt voor 2 flessen | ON5450W02  | Geschikt voor 7 flessen  | ON5450W07 |
| Geschikt voor 3 flessen | ON5450W03  | Geschikt voor 8 flessen  | ON5450W08 |
| Geschikt voor 4 flessen | ON5450W04  | Geschikt voor 9 flessen  | ON5450W09 |
| Geschikt voor 5 flessen | ON5450W05  | Geschikt voor 10 flessen | ON5450W10 |

### Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productafmetingen (lxbxh):</b>  | Breedte minimaal 13 cm maximaal 60cm<br>Lengte minimaal 40 cm maximaal 50 cm<br>Minimale urinefles: 1<br>Maximale urineflessen : 10 |
| <b>Productgewicht:</b>             | 2 -8 kg                                                                                                                             |
| <b>Maximaal gebruikersgewicht:</b> | 5 kg per urine fles                                                                                                                 |

*Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!*

### Omschrijving van het product:

Dit wandrek is geschikt voor muur montage voor het opruimen van urine flessen

|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 2.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450W Urinefles wandrek

### Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 5kg dient niet te worden overschreden.
2. Plaats dit wandrek op een stevige muur
3. Gebruik de juiste materialen voor de betreffende muur
4. Controleer regelmatig of dat het wandrek nog goed is gemonteerd
5. Zorg er voor dat gebruikte urine flessen afgesloten zijn.

### Inbegrepen in de verpakking van dit product:

Urinefles wandrek

### Beoogd gebruik van het product:

Het opbergen van schone en of gebruikte urineflessen.

### Installeren voor gebruik:

Controleer of de constructie van de muur stabiel en stevig genoeg is

Plaats het wandrek niet te hoog i.v.m. met het plaatsen van gebruikte urineflessen

Zorg dat het wandrek waterpas hangt

### Voorafgaand aan het eerste gebruik:


1. Let op dat de urineflessen passend zijn.
2. Lees de volledige gebruiksaanwijzing.

### Reiniging van het product:

1. Wanneer de wagen vies is kan deze worden gereinigd Door middel van sterilisatie

### Onderhoud van het product:

1. Reinig dit wandrek regelmatig met alcohol 70%

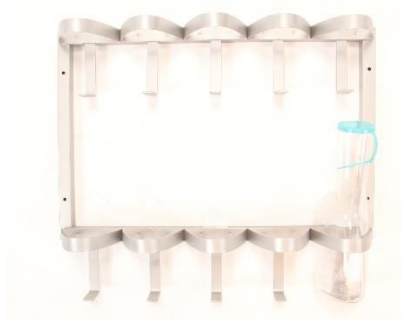

### Technische specificaties:

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruikte materialen:</b>       | <b>Wandrek:</b> RVS (TYPE 3040)                                                                     |
| <b>Productafmetingen (lxbxh):</b>  | Breedte:35cm<br>Diepte :28cm<br>Hoogte: 82 cm<br>Minimale urinefles: 1<br>Maximale urineflessen: 10 |
| <b>Productgewicht:</b>             | 6 kg                                                                                                |
| <b>Maximaal gebruikersgewicht:</b> | 5 kg per urinefles                                                                                  |

|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 2.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450W Urinefles wandrek

### Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

#### 1. Garantie uitsluitingen:

- Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
- Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
- Op het urinefles wandrek zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (m.d.).  
**VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**

#### 2. Garantie bepalingen:

- Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
- De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
- De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

### Foutopsporing:

| Mogelijke Problemen       | Mogelijke oorzaken                                                       | Mogelijke oplossingen                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wandrek los aan de muur   | 1. Schroeven niet goed aangedraaid tof<br>Verkeerde montage materialen . | 1. Draai de schroeven aan of<br>Monteer wandrek opnieuw met de juiste materialen . |
| urine fles past niet goed | 1. Verkeerde urinefles                                                   | 1. Gebruik juiste of urine fles                                                    |

### Uitleg symbolen:

| Symbol                                                                              | Definition                             | Symbol                                                                              | Definition                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  |                                        |  | Fabrikant                               |
|  | Productiedatum                         |  | Goedgekeurd door de Europese unie       |
|  | Serienummer                            |  | Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger     |
|  | Gebruiksaanwijzing is online te vinden |  | Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing |

### Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO-standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fabrikant                                                                                                                                                                  |
| Premis Medical BV.<br>de Nort 20,<br>3931 NG, Woudenberg<br>The Netherlands         | <br> |



|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 2.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450W Urinefles wandrek

Pagina 4 van 4

Doc.nr. G.3.4.3  
UR5450W

Procedure-  
verantwoordelijke Directie

Revisiedatum 23-09-2025

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 2.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |