

Gebruiksaanwijzing



Waskom (soldatenhelm) WAS5140

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	20-11-2020	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016
V.2.0	27-03-2025	R. Keuning	Tweede uitgave QR code, verklaring, voorzorg, MDR

Producttype + artikelnummer:

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: WAS5140
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874310805

Producttype + artikelnummer:

Waskom WAS5140

Omschrijving van het product:

Waskom 4 liter

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Productafmetingen	4 liter, diameter 32cm boven, 19cm onder, hoogte 8,2cm
(Productgewicht:)	500gr.
(Andere eigenschappen:)	Autoclaveerbaar, niet geschikt voor in de vaatwasser


Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Variaties:

8 Liter	KO5007	Waskom 4 Liter	WA5140
4 Liter	KO5120	Waskom 5.5 Liter	WA5141
2 Liter	KO5119		

Voorzorgsmaatregelen.

- Deze waskom is niet steriel, Steriliseren indien nodig.
- Reinigen voor en na gebruik.
- Randen kunnen scherp zijn, voorzichtig gebruiken.
- Opslaan in schone en droge toestand.
- Gemaakt van Roestvrij staal.
- Chemische compatibiliteitscontrole aanbevolen voor gebruik om corrosie te voorkomen.
- Afvoeren in overeenstemming met de wettelijke normen.

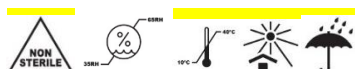

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek Gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	04-06-2020	Auteur:	R.Keuning

Pagina	2 van 4
Doc.nr.	G.3.9.12.1 WAS5140
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-03-2025

Gebruiksaanwijzing

Waskom (soldatenhelm) WAS5140

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Gebruik om te reinigen geen huishoudelijke vaatwasser en/of vaatwasmiddelen
2. Gebruik dit artikel niet meer wanneer deze aangetast en/of beschadigd is.
3. Gebruik geen schuurmiddel of schuurspons

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1x Waskom schaal 4 liter



Beoogd gebruik van het product:

Deze Waskom kunt u gebruiken voor het aan bed wassen van een patiënt.

Klinische voordelen:

Veilig en comfortabel wassen van bedlegerige personen. De conische schaal staat zeer stabiel door vlakke onderzijde

Installeren voor gebruik:

1. Plaats voor u begint alles binnen handbereik (washand/handdoek/1 schaal met schoonwater/1 schaal met was water)

Voorafgaand aan het eerste gebruik:

1. Voor het eerste gebruik dient u de conische schaal te reinigen

Instructies tijdens gebruik:

1. Zorg ervoor dat de schaal niet te vol is, gebruik maximaal 4 liter en zorg dat de schaal niet tot aan de rand vol staat.
2. Plaats de schaal op een vlakke ondergrond.

Reiniging van het product:

1. Autoclaveerbaar (niet in huishoudelijke vaatwasser en/of met vaatwasmiddelen reinigen)
2. Controleer na het reinigen op vochtigheid en droog direct af als de schaal nog vochtig is.

Onderhoud van het product:

1. Nooit met schuurmiddel of schuurspons reinigen

Technische specificaties:

(Productafmetingen (lxbxh):)	Diameter 32 X Hoogte 8,2 cm Inhoud 4 liter
------------------------------	--

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek Gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	04-06-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

Waskom (soldatenhelm) WAS5140

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Medisch hulpmiddel		Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
	Temperatuurlimiet tussen 10°C en 40°C		Luchtvochtigheid tussen 35% en 65%
	Uiterste gebruiksdatum		Niet steriel
	Droog opslaan		Niet in volle zon
	R.V.S. 304		

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Resten blijven achter na reiniging	Autoclaaf defect	Neem contact op met u Autoclaaf leverancier
Na droging komen er vlekken op de schaal	Gereinigd met vaatwasser en/of vaatwasmiddelen	Reinig de schaal met autoclaaf of schoonmaakalcohol
Deuken en scherpen randen	Schaal is gevallen	Deze schaal niet meer gebruiken

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO-standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Distributeur
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek Gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	04-06-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

Waskom (soldatenhelm) WAS5140

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek Gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	04-06-2020	Auteur:	R.Keuning