

Gebruiksaanwijzing



Rolstoel lichtgewicht RO3000

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	03-05-2022	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016
V.2.0	27-06-2025	R. Keuning	Tweede uitgave QR code, verklaring,

Producttype + artikelnummer:

Rolstoel-RO3000 serie

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: RO3000
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874772276, 08718874772580, 08718874772153, 08718874772610

Omschrijving van het product:
 Inklapbare licht gewicht rolstoel

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Productafmetingen	Hoogteverstelling handgreep 88.5-96 cm
Productgewicht	15.35 transportgewicht
Maximaal gebruikersgewicht	130 kg (RO3000XX) 150 kg RO3001XX
Andere eigenschappen	Leverbaar met voet en comfortsteunen

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Variaties:

Zitbreedte 45 standaard voetsteun	RO300035	Zitbreedte 45 standaard voetsteun	RO300135
Zitbreedte 45 standaard comfortsteun	RO300045	Zitbreedte 45 standaard voetsteun	RO300135

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

- Overschrijd nooit het maximaal gebruikers gewicht.
- Gebruik dit loophulpmiddel alleen als waar deze voor bedoeld is
- Stel de rolstoel niet voor langere tijd bloot aan hoge temperaturen. Bijvoorbeeld lang in een warme auto laten liggen of tegen een warme radiator aan zetten, dit kan invloed hebben op de sterkte en levensduur van de plastic onderdelen.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

Afhankelijk van u bestelling 1 rolstoel met voet steunen of comfortbeensteunen 45 cm of 50 cm

Beoogd gebruik van het product:

De rolstoel kan gebruikt worden voor cliënten die zich door ziekte, ongeval of krachtsverlies onmogelijk kunnen verplaatsen met een ander loophulpmiddel of waarvoor het te vermoeiend is om alleen met een ander loophulpmiddel te verplaatsen. De rolstoel kan (voor het verplaatsen) binnen en buitenshuis gebruikt worden.

Versie:	2.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Pagina	2 van 6
Doc.nr.	G.4.3.4.1 RO3000
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-06-2025

Gebruiksaanwijzing

Rolstoel lichtgewicht RO3000

Contra-indicaties van het product:
Let op max gebruikers gewicht

Installeren voor gebruik:
 Uitklappen

- Plaats de achterwielen doormiddel van de achteras in de as geleider te schuiven tot dat de blokkeer pennen aan de andere kant zichtbaar zijn.
- Klap de rolstoel uit door aan de zijkanten naar beneden te drukken zodat tot dat deze vastklikt, Dit gaat makkelijker als 1 zijde iets optilt
- Plaats de Voetsteunen aan de buitenkant in de opening trek de zwarte handel(no.5) omhoog en draai naar binnen zodat deze in de opening valt.
- Plaats de losse zitting.
- Voor de begeleider plaats de handgrepen op de door uw gewenste hoogte en draai deze vast door middel van handel (no.1)

In- en uitstappen


- Zorg dat de rolstoel op de rem staat (no.8)
- Klap de voetsteunen (no.10) zijdelings omhoog. (Gebruik ze niet als steun bij het in- en uitstappen: de rolstoel kan gaan kantelen!)
- Ga goed zitten: rechtop en achter in de stoel. Klap de voetsteunen weer naar beneden en zet de voeten op de steunen.
- Gebruik de veiligheidsgorgel.

Instellen

De hoogte van de voetsteunen is door middel van een inbusbout 2x inbus (no.11) in te stellen op de lengte van uw onderbeen. Deze schroef zit aan de achterkant van de buis. Zet de schroef weer goed vast.

De armsteunen kunnen in hoogte worden versteld door middel van knop(no.3) in te drukken.

Door middel van knop (no.2) kunt u de stand van de arm ligger naar voren of naar achter schuiven.

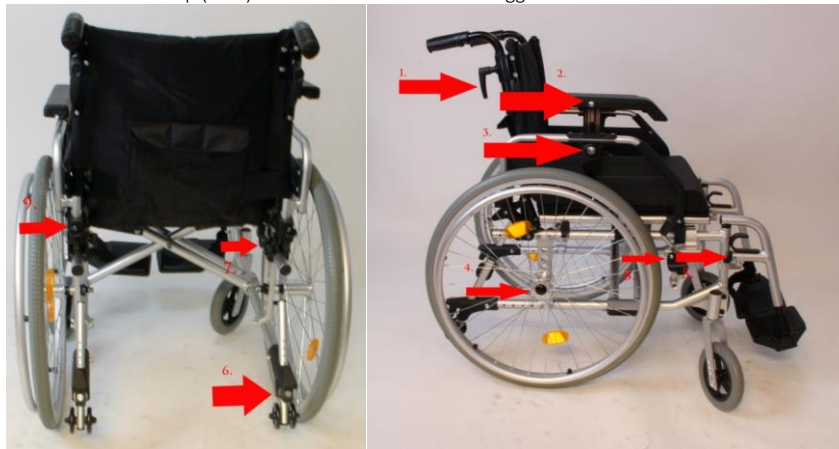

Instructies tijdens gebruik:

- Neem de ruimte. Rijd niet vlak langs muren en stoepranden. Zorg ook dat u aan de voorkant van de rolstoel genoeg ruimte laat; de voeten steken namelijk uit over de steunen.
- Wees in drukte extra voorzichtig. Dit is zowel in het belang van de gebruiker als van de voorbijgangers.
- Let er bij aflopende weggedeelten op dat de rolstoel niet een te hoge snelheid krijgt en er bij wijze van spreken met u van doorgaat. Zorg dus dat u de rolstoel onder controle houdt. Als u zelf rijdt kunt u vaart minderen door de aandrijfhoepels 'tegen te houden' met uw handen. Het op- en afrijden van stoepen, wanneer een begeleider de stoel duwt. Waarschuw de gebruiker voordat u een stoep op- of afgaat. Als het onverwacht gebeurt, is het namelijk een angstig gevoel.
- Stoep op: rijdt vooruit tot aan de stoeprand. Duw daarna de stoel achterover – dit gaat gemakkelijk als u een voet op de steun aan de achterkant plaatst - en rijdt met de voorwielen de stoep op.
- Stoep af: rijdt de rolstoel voorzichtig achteruit met de achterwielen de stoep af. Houd de voorwielen zo veel mogelijk op de grond.

Versie:	2.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rolstoel lichtgewicht RO3000

Zelfstandig stoep op en af

- Gebruik indien mogelijk de schuine op- en afritten.
- Door u gewicht te verplaatsen kunt u met de rolstoel manoeuvreren. Als u extra kracht zet met u handen plaats u gewicht dan naar voren, om kantelen te voorkomen. Dit vraagt om enige handigheid.

Vervoer van de rolstoel

Klap eerst de voetsteunen zijdelings omhoog.

- Voetsteunen kunnen er ook af, door de vergrendeling (no.12) los te koppelen, de voetsteun helemaal naar buiten te draaien en eraf te tillen.
- Pak de rolstoel aan de voor- en achterkant van de zitting vast.
- Vouw de stoel nu op door de zitting omhoog te trekken. Bij een losse zitting moet u deze er eerst uithalen.
- Til de rolstoel nooit op aan de wielen.
- Verwijder de achterwielen door middel van zwarte knop (no.4) in te drukken en deze eraf te trekken.
- Draai handel (no.1) los en druk de handgrepen naar beneden.
- Eenmalige instellingen

Afstellen diepte van de zitting



Draai de inbus los links en rechts en plaats de rug op de door u gewenste diepte



op de gewenste hoek en draai deze weer vast.

Draai de inbus los aan beide zijde en zet deze

Instellen hoogte van de wielen



Plaats de as van het voorwiel in de door u gewenste hoogte.

Plaats de het as huis in de door u gewenste hoogte voor het achterwiel.

Versie:	2.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing




Rolstoel lichtgewicht RO3000

Instellen antiekiep




Trek de ring omhoog voor het op hoogte plaatsen van de anti kiepstand.**Reiniging van het product:**

- Laat de rolstoel niet buiten staan als u hem niet gebruikt.
- De stoel kan afgenomen worden met een lauwe sopje.
- Als de rolstoel niet meer soepel loopt of als er iets anders mis is, neem dan contact op met uw dealer. Ga nooit zelf sleutelen.

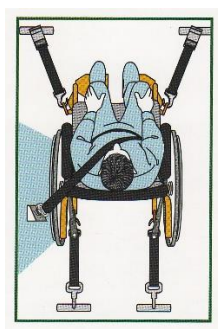

Plaats de riemen zoals afbeelding

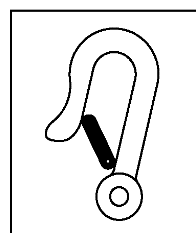

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Hoogte vertelling handgreep werkt niet	Fixatie handel kapot	1. Vervang fixatie handel
Achterwiel blijft niet zitten	1. Wielas blokering kapot 2. Vuil tussen blokering	1. Vervang wielas 2. Maak wielas schoon
Klapt moeilijk uit	Stroeve ondergrond of rem er nog op	Til de rolstoel aan 1 zijde op Haal de rem eraf

Versie:	2.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rolstoel lichtgewicht RO3000

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - c. Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (MFL). **VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf. Uitgezonderd de rubberdop.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	2.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rolstoel lichtgewicht RO3000

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745
 NEN: EN:IEC 62366-1:2015
 NEN: EN:ISO 15223-1:2016
 NEN: EN:ISO 14971-1:2015
 NEN: EN:ISO 11199-2:2021
 CEN: NL:1985:1998
 NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	2.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-06-2025	Auteur:	R. Keuning