

Gebruiksaanwijzing



ON5430WV Ondersteek wandrek

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	06-05-2021	R.Keuning	Eerste uitgave
V.2.0	11-08-2025	R.Keuning	Tweede uitgave: garantiebepaling, verklaring, MDR

Producttype:

Ondersteek wandrek

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands

Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: ON5430WV
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874279102, 08718874279805, 08718874279706, 08718874279607, 08718874279607, 08718874279607

Variaties:

Geschikt voor 1 ondersteek	ON5430WV01	Geschikt voor 6 ondersteken	ON5430WV06
Geschikt voor 2 ondersteken	ON5430WV02	Voorzien van urinaal houders	ON5430WV0?UR54010?
Geschikt voor 3 ondersteken	ON5430EW03		
Geschikt voor 4 ondersteken	ON5430EW04		
Geschikt voor 5 ondersteken	ON5430EW05		

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Breedte:35cm Diepte :28cm Hoogte: 82 cm Minimale ondersteken: 1 Maximale ondersteken: 6
Productgewicht:	6 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	5 kg per ondersteek
Type ondersteek	Volwassen ondersteek

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

Deze ondersteek wandrek is geschikt voor muur montage voor het opruimen van ondersteken Dit wandrek is geschikt voor volwassen ondersteek buikmodel .

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 5kg per ondersteek dient niet te worden overschreden.
2. Plaats dit wandrek op een stevige muur
3. Gebruik de juiste materialen voor de betreffende muur
4. Controleer regelmatig of dat het wandrek nog goed is gemonteerd
5. Zorg er voor dat gebruikte ondersteken of urine flessen afgesloten zijn .

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	11-08-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



ON5430WV Ondersteek wandrek

Pagina 2 van 4

Doc.nr. G.3.3.1
ON5430WV

Procedure-
verantwoordelijke Directie

Revisiedatum 11-08-2025

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

Ondersteek wagen

Beoogd gebruik van het product:

Het opbergen van schone en of gebruikte ondersteken .

Installeren voor gebruik:

Controleer of de constructie van de muur stabiel en stevig genoeg is

Plaats de wandrek niet te hoog i.v.m met het plaatsen van gebruikte ondersteken

Zorg dat het wandrek waterpas hangt

Voorafgaand aan het eerste gebruik:

1. Let op dat de ondersteken passend zijn .
2. Lees de volledige gebruiksaanwijzing.

Reiniging van het product:

1. Lees vóór gebruik altijd de gebruiksaanwijzing van het schoonmaak- of onderhoudsmiddel.
2. RVS is vlekgevoelig. Als je het goed onderhoudt, maak je het weer makkelijk schoon.
3. Heeft je RVS-oppervlak structuur? Poets/polijst altijd met de richting van de structuur mee.
4. Zorg dat speciale middelen alleen in aanraking komen met het materiaal waarvoor ze zijn bedoeld. Zo beschadig je geen andere materialen.
5. Spoel na het schoonmaken het oppervlak altijd af met water en droog het af met een microvezeldoek.
6. Maak RVS iedere dag schoon met een schoonmaakdoek en een warm sopje van afwasmiddel of allesreiniger.
7. Maak het oppervlak één keer per week en na gebruik van een onderhoudsmiddel altijd schoon met een RVS-reiniger.
8. Hoe verwijder je kleine vlekken of verkleuringen op RVS? Hoe je kleine vlekken of verkleuringen schoonmaakt, hangt af van het soort vlek:
Waterkringen en kalkresten: gebruik schoonmaakazijn.
Vlekken die plakken: gebruik een schoonmaakmiddel met chloor.
Bruine of gele verkleuringen: gebruik een middel dat speciaal is gemaakt voor het verwijderen van deze verkleuringen.
9. Hoe verwijder je hardnekkige vlekken op RVS?
Je verwijdert hardnekkige vlekken het beste met een polijstend onderhoudsmiddel voor RVS. Behandel altijd het hele oppervlak, zo voorkom je kleurverschil
10. Autoclaveerbaar

Wat raden wij af voor het schoonmaken van RVS?

1. Controleer regelmatig de werking en staat van de wielen en rem.
2. Gebruik je verkeerde middelen op het RVS, dan ontstaan er verkleuringen en vlekken die je niet meer kunt verwijderen.
Gebruik geen schuurmiddelen, zoals Cif, dit geeft krassen op het RVS-oppervlak.
Gebruik geen zuurhoudende middelen, zoals soda of citroen, dit zorgt voor verkleuringen op het RVS-oppervlak.
Gebruik geen schuurspons, dit geeft krassen op het RVS-oppervlak.

Onderhoud van het product:

3. Reinig dit wandrek regelmatig met alcohol 70%



Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	11-08-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



ON5430WV Ondersteek wandrek

Technische specificaties:

Gebruikte materialen:	Kruk: RVS (TYPE 3040) Wielen Gesloten polyurethaan
Productafmetingen (lxbxh):	Breedte:35cm Diepte :28CM Hoogte: 82 cm Minimale ondersteken: 1 Maximale ondersteken: 6
Productgewicht:	6 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	5 kg per ondersteek

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:

- Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
- Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
- Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer ([UDI](#)) en de productiedatum ([mdd](#)).
VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**

2. Garantie bepalingen:

- Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
- De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
- De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Wandrek los aan de muur	1. Schroeven niet goed aangedraaid tof Verkeerde montage materialen .	1. Draai de schroeven aan of Monteer wandrek opnieuw met de juiste materialen .
Ondersteek rammelt of urine fles past niet goed	1. Verkeerde ondersteek	1. Gebruik juiste ondersteek of urine fles

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO-standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	11-08-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



ON5430WV Ondersteek wandrek

Pagina	4 van 4
Doc.nr.	G.3.3.1 ON5430WV
Procedure-verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	11-08-2025

 Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands
CE 0123 EC REP



Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745
NEN: EN:IEC 62366-1:2015
NEN: EN:ISO 15223-1:2016
NEN: EN:ISO 14971-1:2015
NEN: EN:ISO 11199-2:2021
CEN: NL:1985:1998
NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	11-08-2025	Auteur:	R. Keuning