

Gebruiksaanwijzing

2e Generatie Provo Rollator met verstelbare onderarmsteunen links en rechts met armbedjes van 21 cm.

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	03-02-2025	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands
Product: RO4143AELIXXX
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874818097, 08718874818172, 00000000000000, 08718874818189, 8718874818196, 08718874818202, 08718874818226, 08718874818219



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Producttype + artikelnummer:

Premis Provo 2^e generatie Rollator in diverse kleuren met verstelbare onderarmsteunen links en rechts met armbedjes van 21 cm:

Metallic Aubergine	RO4143AELIXXX	Metallic Titanium	RO4143TELIXXX
Metallic Blauw	RO4143BELIXXX	Metallic Wit (met rode biezen)	RO4143WELIXXX
Metallic Oranje	RO4143OELIXXX	Metallic Zwart	RO4143ZELIXXX
Metallic paars	RO4143PELIXXX	Metallic Appelgroen	RO4143GELIXXX

Past dit product bij u?

De rollator die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende maten waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of deze specifieke rollator geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Onderarmsteunhoogte van 105 tot 125 cm Zithoogte: 61,5 cm Zitbreedte: 43 cm
Productgewicht:	11,95 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg

Als een van deze maten toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

Rollator met stalen frame, voorzien van:

Verstelbare onderarmsteunen in 3 standen (in hoogte verstelbaar van 105 tot 125 cm) met standaard armbedjes (21 cm lang), handvaten, loopparkeerremmen, dienblad, PU zitting, een zitbreedte van 43 cm, draadmand, stokkenbakhouder, opvouwbeveiliging en PU banden.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

- Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 120 kg dient niet te worden overschreden.
- Bij gebruik van het zitje dient u vooraf de rollatorremmen op de parkeerstand te zetten, om weggrollen te voorkomen.
- Het dienblad is niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser of voor het dragen van warme pannen en kopjes.
- Denk bij het gebruik van de opvouwbeveiliging om uw vingers, neem de gebruiksinstructies in acht.
- Til de rollator alleen op indien u hier fysiek toe in staat bent en til de rollator niet boven uw macht uit. De rollator weegt 11,95 kg. Til vanuit uw benen en niet vanuit uw rug.
- Til de rollator uitsluitend op door het frame vast te pakken. De rollator is niet geschikt om te worden getild vanaf de handvaten, duwbuizen, wielen of onderdelen van de draadmandophanging.

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	03-02-2025	Auteur:	R.Keuning

Pagina	2 van 6
Doc.nr.	G.1.1.2.1.330 RO4143AELIXXX
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	03-02-2025

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met verstelbare onderarmsteunen links en rechts met armbedjes van 21 cm.

- Om kantelgevaar of framebreuk van de rollator te voorkomen: Hang geen voorwerpen aan de rollator die hier niet voor bedoeld zijn. Gebruik uitsluitend door Premis goedgekeurde of door Premis speciaal ontwikkelde hulpstukken.
- Breng geen wijzigingen aan op de rollator zonder autorisatie van Premis.
- Repareer of vervang onderdelen van de rollator uitsluitend met originele onderdelen.
- Laat de rollator jaarlijks preventief onderhouden om slijtage tijdig te ondervangen.
- Let bij het lopen op dat u goed tussen de achterwielen van de rollator loopt en zo rechtop mogelijk blijft lopen, om vallen te voorkomen.
- Gebruik de rollator niet wanneer deze beschadigd of defect is.
- Gebruik ten alle tijden de zijflappen van de onderarmschalen, om te voorkomen dat een scheve drukverdeling de rollator beschadigd.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

- 1x Premis Provo 2^e Generatie rollator
- 1x Standaard onderarmsteun rechts (RO4OASTEUNSR)
- 1x Standaard onderarmsteun links (RO4OASTEUNSL)
- 2x Koppelstuk verstelbaar inclusief armband (21cm) en zijflappen (RO4OAH21)
- 2x Handgreep inclusief remhendels en remkabels voor standaard onderarmschalen (RO4OAGREEPL + RO4OAGREEPR)
- 1x Premis Provo Dienblad (RO4DBP)
- 1x Premis Provo Draadmand (RO41MA)
- 2x Vleugelmoeren (RO4FHBUT)

Beoogd gebruik van het product:

De Premis Provo 2^e Generatie Rollator verstelbare onderarmsteunen links en rechts is bestemd voor gebruik bij mensen die slecht ter been zijn en extra ondersteuning behoeven tijdens het staan en lopen. De standaard hoogte is geschikt voor mensen met een gemiddelde tot middellange lichaamslengte. De rollator biedt uitzonderlijk veel ondersteuning, stabiliteit en de mogelijkheid om tussentijds te rusten op het zitje. Hierdoor kan men zich langer zelfstandig verplaatsen, zowel binnenshuis als buiten.

Installeren voor gebruik:

-Zie voor de nummerv verwijzingen de afbeelding op pagina 3

- Haal de rollator uit de doos.
- Klap de rollator uit door de bovenzijde van het achterframe (1) omlaag en naar voren te drukken. Het frame vouwt zich uit. Controleer of de rollator volledig uitgeklaapt is door de bovenzijde van het achterframe (1) goed aan te drukken en ook het zitje goed aan te drukken, tot u een klik voelt. De opbouwbeveiliging (2) is nu volledig uitgevouwen.
- Plaats de steunen (3) in het frame van de rollator (fixatiehendels aan de buitenkant).
- Plaats de vleugelmoeren (5) in het frame om de duwbuizen vast te zetten. Let op dat u de schroef (5a) van voor naar achteren in de openingen plaatst. De bijgeleverde ring (5b) plaatst u aan de achterzijde om de schroef, tussen het frame en de vleugel (5c). Draai de vleugelmoer stevig, maar niet te strak aan, tot de duwbuizen niet meer kunnen verdraaien.
- Plaats daarop het koppelstuk (3a) (fixatiehendels aan de buitenkant).
- Plaats de greep (6) met handvat vervolgens in het koppelstuk. Draai de handgrepen 15 graden naar binnen.
- Draai alle fixatiehendels stevig, maar niet te strak aan, zodat de buizen niet meer kunnen draaien en kantelen.
- Hang de draadmand aan de ophanghaken.
- Leg het dienblad op het zitje. Let er op dat de pootjes van het dienblad in de gaatjes in de zitting vallen, zodat het dienblad niet verschuift.
- Controleer de afstelling van de remhendels. Kunt u de remmen gemakkelijk inknippen en op de parkeerstand zetten, waarbij de rollator stevig remt? Dan staan ze goed. Gaat de rem stroef of te soepel, dan kunt u met een schroevendraaier (niet meegeleverd) de schroeven in het remhuis (6) voorzichtig bijdraaien om de rem af te stellen.
- Controleer of de remschoentjes (7) tijdens het lopen niet over het wiel slepen. De remschoentjes mogen alleen over het wiel slepen wanneer de remhendels ingedrukt/ingeknepen worden. Wanneer dit niet het geval is, kunt u halverwege de remkabel twee hulsjes (8) wegschuiven om de kabelsteller (9) zichtbaar te maken. Gebruik de kabelsteller om de afstand van het remschoentje tot het wiel te vergroten of te verkleinen.

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	03-02-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

2e Generatie Provo Rollator met verstelbare
onderarmsteunen links en rechts met armbedjes van 21 cm.



Voorafgaand aan het eerste gebruik:

1. Meet de afstand vanaf de grond tot aan uw onderarm als u de onderarmen op een comfortabele hoogte voor u uit houdt.
2. Stel de steunen zo in, dat het armbandje gelijk staat aan uw zojuist opgemeten hoogte.
3. Draai het koppelstuk in een hoek van 15 graden naar binnen (zie afbeelding), zodat de achterkant van de armbedjes licht naar buiten wijzen. Zo volgen de armbedjes de natuurlijke houding van uw armen en voorkomt u spierspanning in uw armen en schouders. Ook zorgt dit voor een aanzienlijk langere levensduur van de armbedjes, doordat de drukverdeling beter is.
4. Stel de zijflappen zo af, dat u uw armen eenvoudig erdoorheen kunt steken zonder het klittenband los te moeten maken. Zo zorgen de zijflappen ervoor dat uw armen in het midden van de armbedjes blijven liggen, zonder dat zij u opsluiten. Ook dit is belangrijk voor een juiste drukverdeling op de armbedjes.
5. Oefen het gebruik van de remhendel en parkeerstand voordat u met de rollator gaat lopen.

Bijzonderheden bij dit product:

1. De rollator is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. De rollator kan voorzien worden van diverse sturen en remsystemen. Deze gebruiksaanwijzing is voor de rollator met standaard onderarmsteunen links en rechts. Wij leveren ook rollators met een onderarmschaal alleen links of alleen rechts, met verlengde armbedjes, aangepaste remmen en maatwerk.
2. De rollator is ook verkrijgbaar in andere zitbreedtes en gebruikersgewichtsklassen.
3. Voor de rollator zijn diverse hulpstukken verkrijgbaar om het gebruik aan te passen aan uw behoeften. Denk aan buddyhandgrepen, verzwaren, infuuspalen, zuurstoffleshouders en meer.
4. Indien u een aanpassing denkt nodig te hebben, dan kunt u het beste even contact opnemen met uw verkooppunt of met Premis voor een vrijblijvend advies. Ook uniek maatwerk is mogelijk.
5. Onderdelen van de Premis Provo 2^e generatie rollator zijn verkrijgbaar via uw verkooppunt of via www.premis.nl

Reiniging van het product:

1. Reinig de rollator regelmatig met een lichtvochtige doek en een zachte zeep. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Test het schoonmaakmiddel vooraf op een onopvallende plek op de rollator en breng het schoonmaakmiddel niet rechtstreeks aan op de rollator.
2. Reinig het dienblad handmatig. Plaats het dienblad NIET in de vaatwasser.

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	03-02-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

**2e Generatie Provo Rollator met verstelbare
onderarmsteunen links en rechts met armbedjes van 21 cm.**

Onderhoud van het product:

1. Wanneer u de rollator niet gebruikt; stal de rollator in een overdekte en droge ruimte, om roestvorming tegen te gaan.
2. Reinig regelmatig de rollator om ophoping van vuil in de bewegende delen tegen te gaan en te verwijderen.
3. Laat uw rollator tenminste 1x per jaar preventief onderhouden om versleten onderdelen te vervangen voordat zij defect gaan. Zo voldoet u aan de garantievoorwaarden en waarborgt u de veiligheid van het product.

Technische specificaties:

Gebruikte materialen:	Staal, Polyurethaan, verzinkt staal, lak
Productafmetingen (lxbxh):	Onderarmsteunhoogte van 105 tot 125 cm Frame: 73x60x67 cm Zitting: 39x22x2,5 cm Mandje: 30x40x20 cm
Productgewicht:	11,95 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg
Periodiek vervangbare onderdelen	Wielager: RO4WWL PU banden: RO4WE Moer t.b.v. wielas: RO4WMO Wielas: RO4WWB Remkabel compleet: RO4KOCOMPLEET Armbedje 21 cm: RO4OAB4 Zijflappen 21 cm: RO4OAB3 Vleugelhoer: RO4FHBUT Schroeven in remhendel: RO4RLLS

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - c. Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (MFL).
VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
 - d. Bij verkeerde afstelling van de steunen of bij niet gebruiken van de zijflappen heeft u géén garantie op schade aan de armbedjes.
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het frame bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Productiedatum		Fabrikant
	Serienummer		Goedgekeurd door de Europese unie
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
			Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	03-02-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met verstelbare
onderarmsteunen links en rechts met armbedjes van 21 cm.

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
De wielen rollen niet meer	De lagers (en wielas) zijn versleten	Lagers (en wielas) vervangen
De handvaten verdraaien of komen los	De handvaten zijn uitgerekt of versleten	De handvaten vastlijmen met contactlijm of vervangen
Één van de wielen zweeft	1. De rollator is niet goed uitgekapt OF 2. Het frame is scheef	1. De rollator volledig uitklappen OF 2. Het frame laten repareren
Het in- en uitklappen van de nieuwe rollator gaat stroef	De rollator is nieuw	De rollator meermaals achterelkaar uit- en inklappen tot het versoepelt.
Ik krijg last van mijn handen/armen/schouders bij het lopen	1. De duwbuisen staan verkeerd afgesteld OF 2. U heeft last van trillingen door oneffen ondergronden	1. Het koppelstuk in een hoek van 15 graden naar binnen draaien. OF 2. De remmen juist afstellen
De remmen remmen niet voldoende	1. Het remschoentje is versleten OF 2. De remmen zijn verkeerd afgesteld	1. Het remschoentje vervangen OF 2. De remmen juist afstellen
Ik krijg de parkeerrem moeilijk omlaag/omhoog gedrukt.	De remhendel is te strak afgesteld	Draai de schroeven in het remhuis voorzichtig een stukje losser tot de remhendel goed te bedienen is. Let daarbij op dat de remhendel niet te veel speling krijgt.
De remkabels blijven haken aan deuren etc.	De steunen staan niet goed afgesteld	Het koppelstuk in een hoek van 15 graden naar binnen draaien.
Het armbedje scheurt in.	1. De zijflappen worden niet gebruikt OF 2. De armbedjes zijn versleten	1. De zijflappen gebruiken en de armbedjes vervangen OF 2. De armbedjes vervangen

Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

 Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands
 



Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	03-02-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

2e Generatie Provo Rollator met verstelbare
onderarmsteunen links en rechts met armbedjes van 21 cm.

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745
NEN: EN:IEC 62366-1:2015
NEN: EN:ISO 15223-1:2016
NEN: EN:ISO 14971-1:2015
NEN: EN:ISO 11199-2:2021
CEN: NL:1985:1998
NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek/intern gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	03-02-2025	Auteur:	R.Keuning