

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met standaard duwstang en rem beugel onder

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0.	12-12-2019	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016
V.1.1	15-10-2024	R. Keuning	Tweede uitgave tekst en foto aangepast
V.2.0	02-01-2025	R. Keuning	Derde uitgave Verklaring

Producttype + artikelnummer:

Premis Provo 2° generatie Rollator met stuurstang en rembeugel onder , in diverse kleuren.

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: De Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I.

De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: RO4143AELGXXX
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874118272, 08718874135279, 08718874138676, 08718874777851, 08718874131875, 08718874128479, 08718874131875, 08718874125072

Metallic Aubergine	RO4143AELGXXX	Metallic Titanium	RO4143TELGXXX
Metallic Blauw	RO4143BELGXXX	Metallic Wit (met rode biesen)	RO4143WELGXXX
Metallic Oranje	RO4143OELGXXX	Metallic Zwart	RO4143ZELGXXX
Metallic paars	RO4143PELGXXX	Metallic Appelgroen	RO4143GELGXXX

Past dit product bij u?

De rollator die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of deze specifieke rollator geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Handvat hoogte 78 tot 100 cm Zithoogte: 61,5 cm Zitbreedte: 43 cm
Productgewicht:	10,15 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

Rollator met stalen frame, voorzien van: Duwbeugel met looprem, dienblad, harde kunststof zitting, een zitbreedte van 43 cm, draadmand, stokenbakhouder, opvouwbeveiliging en PU banden.

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	02-01-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met standaard duwstang en rem beugel onder

Pagina	2 van 6
Doc.nr.	G.1.1.2.1.230 RO4143AELGXXX
Procedure-verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	02-01-2025

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 120 kg dient niet te worden overschreden.
2. Bij deze rollator is het niet mogelijk om het zitje te gebruiken .
3. Het dienblad is niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
4. Denk bij het gebruik van de opvouwbeveiliging om uw vingers, neem de gebruiksinstructies in acht.
5. Til de rollator alleen op indien u hier fysiek toe in staat bent en til de rollator niet boven uw macht uit. De rollator weegt 13,4 kg. Til vanuit uw benen en niet vanuit uw rug.
6. Til de rollator uitsluitend op door het frame vast te pakken. De rollator is niet geschikt om te worden getild vanaf de handvaten, duwbuizen, wielen of onderdelen van de draadmandophanging.
7. Om kantelgevaar of framebreuk van de rollator te voorkomen: Hang geen voorwerpen aan de rollator die hier niet voor bedoeld zijn. Gebruik uitsluitend door Premis goedgekeurde of door Premis speciaal ontwikkelde hulpstukken.
8. Breng geen wijzigingen aan op de rollator zonder autorisatie van Premis.
9. Repareer of vervang onderdelen van de rollator uitsluitend met originele onderdelen.
10. Laat de rollator jaarlijks preventief onderhouden om slijtage tijdig te ondervangen.
11. Let bij het lopen op dat u goed tussen de achterwielen van de rollator loopt en zo rechtop mogelijk blijft lopen, om vallen te voorkomen.
12. Gebruik de rollator niet wanneer deze beschadigd of defect is.
13. Gebruik ten alle tijden de zijflappen van de onderarmschaal, om te voorkomen dat een scheve drukverdeling de rollator beschadigd.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

- 1x Premis Provo 2^e Generatie rollator
- 1x Duwstang met rembeugel onder
- 1x Premis Provo Dienblad (RO4DBP)
- 1x Premis Provo Draadmand (RO41MA)
- 2x Vleugelmoeren (RO4FHBUT)

Beoogd gebruik van het product:

De Premis Provo 2^e Generatie Rollator met duwstang I is bestemd voor gebruik bij mensen die slecht ter been zijn en extra ondersteuning behoeven tijdens het staan en lopen.. De rollator biedt uitzonderlijk veel ondersteuning, stabiliteit. Hierdoor kan men langer zelfstandig verplaatsen, zowel binnenshuis als buiten.

Installeren voor gebruik:

-Zie voor de nummerv verwijzingen de afbeelding op pagina 3.

1. Haal de rollator uit de doos.
2. Klap de rollator uit door de bovenzijde van het achter frame (1) omlaag en naar voren te drukken. Het frame vouwt zich uit. Controleer of de rollator volledig uitgekapt is door de bovenzijde van het achter frame (1) goed aan te drukken en ook het zitje goed aan te drukken, tot u een klik voelt. De opvouwbeveiliging (2) is nu volledig uitgevouwen.
3. Plaats de duwstang (3) in het frame van de rollator. Let op dat u de remkabels (4) naar voren plaatst en deze niet gedraaid zitten.
4. Plaats de vleugelmoeren (5) in het frame om de beugel vast te zetten. Let op dat u de moer (5a) van voor naar achteren in de openingen plaatst. De bijgeleverde ring (5b) plaatst u aan de achterzijde om de moer, tussen het frame en de vleugel (5c). Draai de vleugelmoer stevig, maar niet te strak aan, tot de steunen niet meer kunnen verdraaien.
5. Hang de draadmand aan de ophanghaken.
6. Leg het dienblad op het zitje. Let er op dat de pootjes van het dienblad in de gaatjes in de zitting vallen, zodat het dienblad niet verschuift.
7. Controleer de afstelling van de remhendel. Kunt u de remmen gemakkelijk inknippen en op de parkeerstand zetten, waarbij de rollator stevig remt? Dan staan ze goed. Gaat de rem stroef of te soepel, dan kunt u met een schroevendraaier (niet meegeleverd) de schroeven in het remhuis (6) voorzichtig bijdraaien om de rem af te stellen.
8. Controleer of de remschoentjes (7) tijdens het lopen niet over het wiel slepen. De remschoentjes mogen alleen over het wiel slepen wanneer de remhendels ingedrukt worden. Wanneer dit niet het geval is, kunt u halverwege de remkabel twee hulsjes (10) wegschuiven om de kabelsteller zichtbaar te maken. Gebruik de kabelsteller om de afstand van het remschoentje tot het wiel te vergroten of te verkleinen.

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	02-01-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met standaard duwstang en rem beugel onder

	Zitting: 39x22x2,5 cm Mandje: 30x40x20 cm
Productgewicht:	13,4 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg
Periodiek vervangbare onderdelen:	Wielager: RO4WWL PU Banden: RO4WE Moer t.b.v. wielas: RO4WMO Wielas: RO4WWB Remkabel eenzijdig voor onderarmschalen: RO4EZRLANG

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

- Garantie uitsluitingen:
 - Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (MDF). **VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
- Garantie bepalingen:
 - Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - De garantietermijn van het frame bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Foutopsporing:

De wielen rollen niet meer	De lagers zijn (en wielas) versleten	Lagers (en wielas) vervangen
De handvaten verdraaien of komen los	De handvaten zijn uitgerekt of versleten	De handvaten vastlijmen met contactlijm of vervangen
Één van de wielen zweeft	1. De rollator is niet goed uitgekapt OF 2. Het frame is scheef	1. De rollator volledig uitklappen OF 2. Het frame laten repareren
Het in- en uitklappen van de nieuwe rollator gaat stroef	De rollator is nieuw	De rollator meermaals achterelkaar uit- en inklappen tot het versoepelt.
Ik krijg last van mijn handen/armen/schouders bij het lopen	1. De duwbuizen staan verkeerd afgesteld OF 2. U heeft last van trillingen door oneffen ondergronden	1. De duwbuizen juist afstellen. OF 2. De PU banden vervangen
De remmen remmen niet voldoende	1. Het remschoentje is versleten OF 2. De remmen zijn verkeerd afgesteld	1. Het remschoentje vervangen OF 2. De remmen juist afstellen
Ik krijg de parkeerrem moeilijk omlaag/omhoog gedrukt.	De remhendel is te strak afgesteld	Draai de schroeven in het remhuis voorzichtig een stukje losser tot de remhendel goed te bedienen is. Let daarbij op dat de remhendel niet te

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	02-01-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met standaard duwstang en rem beugel onder

Pagina	5 van 6
Doc.nr.	G.1.1.2.1.230 RO4143AELGXXX
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	02-01-2025

De remkabels blijven haken aan deuren etc.	De steunen staan niet goed afgesteld	veel speling krijgt. De steunen in een hoek van 15 graden naar binnen draaien.
--	--------------------------------------	---

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Het product voldoet aan de NEN1950:1998 normering.
3. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
4. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

 Fabrikant
Premis Medical BV. De nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands
 



Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	02-01-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met standaard duwstang en rem beugel onder

Pagina	6 van 6
Doc.nr.	G.1.1.2.1.230 RO4143AELGXXX
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	02-01-2025

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Speciale variaties

- Drukrem – de derde letter na RO4143 verandert van een L in een D.
- Eenzijdig remsysteem links – de zesde letter na RO4143 verandert van een X in een L
- Eenzijdig remsysteem rechts – de zesde letter na RO4143 verandert van een X in een R
- Passief remsysteem – de zevende letter na RO4143 verandert van een X in een A

Versie:	2.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	02-01-2025	Auteur:	R.Keuning