

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	22-12-2025	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Distributor's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
3931 NG Woudenberg
The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: Mobilex Buffalo
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 05740001411102, 05740001411126, 05740001411331, 05740001411348

Producttype + artikelnummer:

Variaties:

BUFFALOHD62	Buffalo Softbanden 62cm
BUFFALOHDST62	Buffalo Standaard banden 62cm
BUFFALOHD65	Buffalo Softbanden 55cm
BUFFALOHDST55	Buffalo Standaard banden 55cm



Past dit product bij u?

De rollator die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of deze specifieke rollator geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Handvathoogte van 74 tot 102 cm (62cm) of 66 tot 86 cm (55cm) instelbaar.
Rollator	Zithoogte: 62 cm of 55cm
Productgewicht:	Afhankelijk van type tussen 7,5 en 7,9 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	200 kg / HD 200kg
Maximaal gebruikersgewicht tas:	5 kg

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

De Buffalo rollator heeft een gepoedercoat, versterkt frame met 4 wielen. Het lichtgewicht frame maakt het inklappen eenvoudig en zorgt voor gemakkelijke opslag en transport. De rollator rijdt soepel en is voldoende stabiel. De rollator wordt geleverd met een gemonteerd zitje, een ruggordel, een krukhouders en een boodschappentas.

Beoogd gebruik van het product:

Dit product is een medisch hulpmiddel dat is ontworpen om de mobiliteit te vergroten van personen die moeite hebben met staan of lopen. De rollator stelt deze personen in staat om hun dagelijkse activiteiten weer te kunnen uitvoeren. De rollator is geschikt voor personen die als gevolg van diverse aandoeningen stabiele ondersteuning nodig hebben tijdens het lopen. De rollator mag alleen worden gebruikt als ondersteuning bij het staan en lopen. Elk ander gebruik is verboden.

Indicaties

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator

Pagina 2 van 8

Document G.1.1.8.2
BUFFALO

Procedure-
verantwoordelijk Kwaliteitscoördinator

Revisiedatum 22-12-2025

De rollator is een medisch hulpmiddel dat is ontworpen om mensen met functionele beperkingen te helpen. De indicaties voor gebruik zijn aandoeningen die mobiliteitsbeperkingen en handicaps veroorzaken, waardoor zelfstandig zitten, staan en lopen wordt belemmerd.

Daarom is er behoefte aan extra stabiele ondersteuning bij het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten. Indicaties kunnen niet worden gekoppeld aan één specifiek klinisch beeld en zijn afhankelijk van een individuele beoordeling van de gezondheidstoestand van de potentiële gebruiker door een arts of fysiotherapeut. De belangrijkste doelgroepen zijn ouderen, mensen met parese, reumatische aandoeningen en andere mensen met beperkte mobiliteit van de lumbale wervelkolom, knieën of heupen. Het gebruik van het product voor andere doeleinden dan hierboven beschreven is verboden.

Contra-indicaties

Rollators zijn niet geïndiceerd voor personen die hun evenwicht niet goed kunnen bewaren in een staande positie. Het hulpmiddel mag niet worden gebruikt als de gebruiker problemen heeft met de waarneming. Contra-indicaties kunnen niet worden gekoppeld aan één specifiek klinisch beeld en zijn afhankelijk van een individuele beoordeling van de gezondheidstoestand van de potentiële gebruiker. De keuze van een orthopedisch hulpmiddel dat geschikt is voor een bepaald klinisch beeld moet altijd worden gemaakt in overleg met een specialist of fysiotherapeut. Neem bovendien de veiligheidsinformatie in hoofdstuk 2 in acht.

Toepassingsgebieden

Het product kan worden gebruikt in de thuiszorg, in zorginstellingen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Medische incidenten en ongewenste voorvallen. Neem in geval van ongewenste voorvallen met betrekking tot het apparaat contact op met de dealer.

Veiligheidsvoorschriften

- Zorg ervoor dat alle gebruikers van het apparaat deze handleiding hebben gelezen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het product alleen in perfecte staat.
- Neem onmiddellijk contact op met de dealer als er defecten of fouten worden geconstateerd.
- Volg alle aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant op.
- Lees de informatie op het productetiket.
- Gebruik het product alleen voor het beschreven doel.
- Ga niet op het apparaat staan.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming van de fabrikant heeft.
- Let er bij het afstellen van het apparaat op dat u uw vingers of andere lichaamsdelen niet beklemt.
- Controleer voor gebruik altijd of de wielremmen goed functioneren.
- Zorg er vóór gebruik voor dat de rollator volledig is uitgeklapt en dat de anti-klapvergrendeling is ingeschakeld.
- Gebruik de rollator alleen op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Gebruik de zitting alleen als de remmen goed zijn vergrendeld.
- Beide remmen moeten altijd tegelijkertijd geactiveerd zijn.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van 200 kg niet.
- De maximale belasting van de boodschappentas is 5 kg.
- Het is niet toegestaan om een extra persoon op de zitting te vervoeren.
- Beide remmen moeten altijd geactiveerd zijn als de rollator niet in gebruik is.
- Alle 4 wielen moeten altijd contact met de grond hebben.
- De rollator is niet bedoeld om te worden verplaatst terwijl u erop zit. De zitting mag alleen worden gebruikt wanneer de rollator stilstaat met de remmen ingeschakeld.

Meegeleverde onderdelen

Het apparaat wordt geleverd in een kartonnen doos, opgevouwen voor gemakkelijker transport.

Elke productverpakking moet het volgende bevatten:

✓ 1 rollator inclusief: een gemonteerd zitje, ruggordel, krukhouders en boodschappentas

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator


✓ 1 gebruikershandleiding;

Controle vooraf

Controleer de inhoud van de doos aan de hand van bovenstaande lijst. Als u in dit stadium constateert dat er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.

De rollator bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Duwhendels
2. Remhendels
3. Buizen onder de zitting (frame opent wanneer u van beide kanten drukt)
4. Hoogteverstelknoppen voor de duwhendels
5. Remmen
6. Opvouwbaar riem (trek hier om de rollator op te vouwen)
7. Zitting
8. Ontgrendelingsknop voor het opvouwen
9. Boodschappentas
10. Wielen

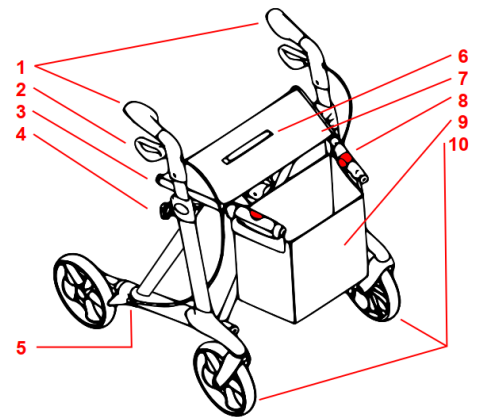

Functieomschrijving

De rollator uitklappen

Druk op de rode knop (ontgrendeling van de vouwvergrendeling) op de zadelbuis (zie afbeelding rechts). Druk beide zadelbuizen naar beneden totdat het frame uitklapt. Wanneer het frame "klikt", is de rollator vergrendeld in de uitgeklapte positie.

Om te controleren of het frame volledig is uitgeklappt, probeer de zijkanen van de rollator tegen elkaar te drukken. Controleer of de knoppen voor de hoogteverstelling goed vastzitten. Controleer of beide handgrepen op dezelfde hoogte staan en stabiel zijn.



WAARSCHUWING! Het gebruik van een defecte rollator is ten strengste verboden. Controleer vóór gebruik altijd de werking van alle onderdelen van de rollator. Als bovenstaande aanbevelingen niet worden opgevolgd, kunnen er verwondingen ontstaan.

De rollator inklappen

Om de rollator in te klappen, trek de riem op de zitting omhoog totdat de vouwvergrendeling vastklikt.

WAARSCHUWING! Beide handgrepen moeten altijd op dezelfde hoogte worden ingesteld. De juiste hoogte van de handgrepen moet altijd de ellebooghoogte van de gebruiker zijn wanneer deze staat met de armen ontspannen.

Hoogteverstelling van de duwstangen

Om de hoogte van de duwstangen aan te passen, draai je de hoogteverstellingsknop los door deze tegen de klok in te draaien en de hoogte aan te passen. Draai de knop weer vast door deze met de klok mee te draaien en herhaal dit voor de andere stang. Zorg ervoor dat beide stangen op dezelfde hoogte staan. Hoogteverstelling van de duwstang

Om de hoogte van de duwstang aan te passen, draai je de hoogteverstellingsknop los en schuif je de stang naar de gewenste stand. Draai de knop vast en herhaal dit voor de andere stang.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator

LET OP: Beide stangen moeten altijd op dezelfde hoogte staan. De juiste hoogte van de duwstangen moet altijd op polshoogte van de gebruiker zijn wanneer deze staat met de armen langs het lichaam.

De remmen gebruiken

De remmen worden geleidelijk geactiveerd door de remhendels omhoog te trekken. Om de rollator volledig tot stilstand te brengen, moeten beide remhendels volledig omhoog getrokken zijn. Om de rollator weer in beweging te brengen, deactiveert u de remmen door de remhendels los te laten.

WAARSCHUWING! Activeer de remmen altijd wanneer u de rollator op een hellend oppervlak gebruikt.

Parkeerremmen

Zorg ervoor dat de rollator niet beweegt voordat u de parkeerremmen activeert. Om de rollator te parkeren, duwt u de remhendels naar beneden totdat u een klik hoort. Om de parkeerremmen te deactiveren, trekt u de remhendels omhoog.

WAARSCHUWING! Activeer de parkeerremmen altijd wanneer de rollator niet in gebruik is en/of op een hellend oppervlak staat. Voordat u de parkeerremmen deactiveert, gaat u achter de rollator staan en pakt u beide duwhendels stevig vast.

WAARSCHUWING! Activeer de parkeerremmen altijd voordat u op de rollator gaat zitten. Ga tijdens het zitten nooit achterover zitten. Het is aanbevolen om alleen op het voorste gedeelte van de zitting te zitten. Ga niet op de tas zitten.

Montage

Voor dit apparaat zijn geen montage-instructies nodig.

Accessoires

De rollator kan worden uitgerust met de volgende accessoires (niet standaard inbegrepen):

- Stevige zitting met bekleding
- Dienblad
- Rem met snelheidsreductie
- Zachte wielen
- Opklapbare paraplu

Technische specificaties:

Rollator Buffalo HD	Standaard 312305	Klein 312307	Standaard met SOFT-wielen 312385	Klein met zachte wielen 312387
Hoogte van de duwgrepen (verstelbaar)	74 – 102 cm	66- 86 cm	74 – 102 cm	66 – 86 cm
Aanbevolen gebruikerslengtes	150 200 cm	125 – 170 cm	150 200 cm	125 – 170 cm

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator

Zithoogte	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Totale breedte opengeklapt / opgevouwen	68 / 22,5 cm			
Binnenbreedte tussen de duwgrepen	56 cm			
Lengte (diepte)	66 cm			
Gewicht (+ zak 380 g)	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,6 kg
Maximale belasting (rolstoel/tas)	200 kg / 5 kg			
Remmen	2 afsluitbare vakken met parkeerfunctie			
Wiel maten	Voor- en achterzijde 200 x 35 mm			

Product etiket



Verzorging en onderhoud

Normale vervuiling kan worden verwijderd met standaard schoonmaakmiddelen en een spons of zachte doek. Controleer de specifieke productinformatie en gebruik alleen commerciële schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor reiniging en desinfectie (gebruik geen producten die alcohol bevatten en geen oplosmiddelen of schuurmiddelen).

Wielen kunnen worden gereinigd met heet water en een mild reinigingsmiddel. Na het reinigen moeten de wielagers periodiek of wanneer de wielen beginnen te piepen, worden gesmeerd met olie.

Het product heeft in principe geen onderhoud nodig. Ondanks de solide constructie en het gebruik van resistente materialen is het product onderhevig aan slijtage. Het is daarom aan te raden het product regelmatig te laten controleren door een professionele service. Wij adviseren de volgende controles:

- ✓ Reiniging en desinfectie van het product
- ✓ Controle van het frame/product op verbogen, beschadigde, versleten of gecorrodeerde onderdelen
- ✓ Controle en vervanging van slijtageonderdelen indien nodig
- ✓ Algemene controle van het product

Verwachte levensduur: Normaal gesproken 5 jaar, afhankelijk van het gebruik.

Opslag: Wij adviseren opslag op een droge plaats bij temperaturen boven 0 °C.

Vervoer

Het wordt aanbevolen het apparaat op te vouwen voor transport. Het apparaat moet stabiel en veilig worden vervoerd zonder risico op plotselinge of gevaarlijke bewegingen tijdens het transport.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator

Hergebruik

Het product is geschikt voor hergebruik. Voordat een nieuwe gebruiker het product in gebruik neemt, moet het apparaat technisch worden gecontroleerd en gedesinfecteerd.

Foutopsporing:

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De rollator is moeilijk te besturen of te duwen.	Vuil tussen de wielen en de voorvork.	Verwijder vuil of haar tussen de wielen en de voorvork.
De remmen werken niet of werken slechts aan één kant.	De remblokken zijn versleten, of de remmen zijn niet correct afgesteld.	Stel de remmen af. Vervang de remblokken indien nodig. (→ servicecentrum)
De zitting past niet op het frame tijdens het uitklappen van de rollator.	Het vergrendelingsmechanisme bevindt zich in een verkeerde positie of is defect.	Controleer of het vergrendelingsmechanisme in de juiste positie staat. Vervang het indien nodig (→ servicecentrum)

Afvoer van het product

Het product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid en moet naar het plaatselijke recyclingcentrum worden gebracht.

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - c. Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer(UDI) en de productiedatum (MMJJ).
VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het frame bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - d. Vervangen onderdelen ontvangen 6 maanden garantie vanaf datum van reparatie, mits de onderdelen origineel zijn.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Klein chemisch afval		Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator

	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
	Distributeur		Binnen en buiten te gebruiken
	Maximaal laadgewicht tas		Maximaal gewicht
	Maximale breedte		Medisch hulpmiddel
	Droog opslaan		Niet in volle zon

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Distributeur
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	CE 0123 EC REP



Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar

Uitleg:

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex Buffelo rollator

Pagina 8 van 8

Document G.1.1.8.2
BUFFALO

Procedure-
verantwoordelijk Kwaliteitscoördinator

Revisiedatum 22-12-2025

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	22-12-2025	Auteur:	R. Keuning