

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	23-12-2025	R. Keuning	Eerste uitgave

Producttype + artikelnummer:

Distributer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
3931 NG Woudenberg
The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: Mobilex Lion
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 05740001411362, 057400

Producttype + artikelnummer:

Variaties:

PANDABL	Panda Comfort blauw
PANDARO	Panda Comfort rood



Past dit product bij u?

De rollator die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of deze specifieke rollator geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Handvathoogte van 90 tot 112 cm (62 cm) of 77 tot 90 cm (53 cm) instelbaar. Zithoogte: 62 cm of 53 cm Zitbreedte: 56 cm
Productgewicht:	Standaard met soft wielen 9,3 kg (62 cm) of 9,0 kg (53 cm)
Maximaal gebruikersgewicht:	200 kg

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Pagina

2 van 5

Document

G.1.1.8.6
PANDACO

Procedure-
verantwoordelijk

Kwaliteitscoördinator

Revisiedatum

23-12-2025

Omschrijving van het product:

De rollator heeft 4 grote, zachte wielen en een gepoedercoat aluminium frame. Dankzij de gebruikte materialen is de gehele rollator corrosiebestendig. Het lichte frame maakt het gemakkelijk om de rollator op te vouwen en zorgt voor eenvoudige opslag en transport. De rollator rijdt soepel en is voldoende stabiel. De hoogte van de duwstangen is verstelbaar. De rollator wordt geleverd met een gemonteerd zitje, een rugriem en een boodschappentas. De rollator is voorzien van reflectoren op de duwstangen, de tas en de zijkanten van het frame.

Beoogd gebruik van het product:

Dit product is een medisch hulpmiddel dat is ontworpen om de mobiliteit te vergroten van personen die moeite hebben met staan of lopen. De rollator stelt deze personen in staat om hun dagelijkse activiteiten weer te kunnen uitvoeren. De rollator is geschikt voor personen die als gevolg van diverse aandoeningen stabiele ondersteuning nodig hebben tijdens het lopen. De rollator mag alleen worden gebruikt als ondersteuning bij het staan en lopen. Elk ander gebruik is verboden.

Indicaties

De rollator is een medisch hulpmiddel dat is ontworpen om mensen met functionele beperkingen te helpen. De indicaties voor gebruik zijn aandoeningen die mobiliteitsbeperkingen en handicaps veroorzaken, waardoor zelfstandig zitten, staan en lopen wordt belemmerd.

Daarom is er behoefte aan extra stabiele ondersteuning bij het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten. Indicaties kunnen niet worden gekoppeld aan één specifiek klinisch beeld en zijn afhankelijk van een individuele beoordeling van de gezondheidstoestand van de potentiële gebruiker door een arts of fysiotherapeut. De belangrijkste doelgroepen zijn ouderen, personen met parese, reumatische aandoeningen en andere mensen met beperkte mobiliteit van de lumbale wervelkolom, knieën of heupen. Het gebruik van het product voor andere doeleinden dan hierboven beschreven is verboden.

Contra-indicaties

Rollators zijn niet geïndiceerd voor personen die hun evenwicht niet goed kunnen bewaren in een staande positie. Het hulpmiddel mag niet worden gebruikt als de gebruiker problemen heeft met de waarneming. Contra-indicaties kunnen niet worden gekoppeld aan één specifiek klinisch beeld en zijn afhankelijk van een individuele beoordeling van de gezondheidstoestand van de potentiële gebruiker. De keuze van het juiste orthopedische hulpmiddel voor een bepaald klinisch beeld moet altijd in overleg met een specialist of fysiotherapeut worden gemaakt. Neem bovendien de veiligheidsinformatie in acht.

Gebruiksgebieden

Het product is geschikt voor gebruik binnen en buiten en kan worden gebruikt door particulieren in huiselijke omgevingen, in de thuiszorg, in gezondheids- en zorginstellingen en in ziekenhuizen.

Medische incidenten en ongewenste voorvallen

Neem contact op met de dealer in geval van ongewenste voorvallen met betrekking tot het apparaat

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Veiligheidseisen

- Zorg ervoor dat deze handleiding is gelezen door alle personen die het apparaat gebruiken.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het product alleen in onberispelijke staat.
- Als er defecten of fouten worden ontdekt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met de dealer.
- Volg alle aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant op.
- Let op de informatie op het productlabel.
- Gebruik het product alleen voor het beschreven doel.
- Klim niet op het apparaat.
- Breng geen constructieve wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij de fabrikant deze wijzigingen schriftelijk heeft goedgekeurd.
- Het apparaat en de tas mogen niet worden belast met meer gewicht dan aangegeven in de Technische gegevens.
- Alle wielen MOETEN tijdens het gebruik ALTIJD in contact zijn met de vloer. Dit zorgt ervoor dat de rollator goed in balans is en vermindert het risico op ongelukken.
- Wees voorzichtig bij het monteren of afstellen van onderdelen van het apparaat.
- Controleer voor gebruik altijd of de remmen goed werken.
- Gebruik de rollator alleen wanneer deze volledig is uitgeklappt en de vergrendeling is geactiveerd.
- Het zitje mag alleen gebruikt worden wanneer de parkeerremmen geactiveerd zijn.
- Beide remmen moeten altijd tegelijkertijd geactiveerd of vergrendeld zijn.
- Het is niet toegestaan om een persoon of voorwerp op de zitting te dragen terwijl de rollator in beweging is.
- Parkeerremmen dienen altijd ingeschakeld te zijn wanneer de rollator niet gebruikt wordt.

Geleverde onderdelen

Het apparaat wordt geleverd in een kartonnen doos. De inhoud van de verpakking is:

- ✓ 1 opgevouwen rollator inclusief gemonteerd zitje, ruggordel en boodschappentas;
- ✓ 1 wandelstokhouder, niet gemonteerd (in een plastic zak in het zijvak van de tas);
- ✓ 1 gebruikershandleiding;

Voorlopige controle

Controleer de inhoud van de doos met de bovenstaande lijst. Als je in dit stadium ontdekt dat er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met je leverancier.

De rollator bestaat uit de volgende elementen:

1. Duwstang (Materiaal: PP)
2. Remhendel (Materiaal: PP)
3. Zadelbuis
4. Verstelknop voor stuurhoogte
5. Rem
6. Achterwiel
7. Tip-pedaal
8. Zadel met riem voor opvouwen (Materiaal: PA)
9. Reflectoren
10. Rugleuning (Materiaal: PA)
11. Opvouwvergrendeling
12. Boodschappentas (Materiaal: PA)
13. Voorwiel



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Beschrijving montage

Dit apparaat heeft geen montagehandleiding nodig.

Functiebeschrijving

Het frame in- en uitvouwen

Om het frame uit te klappen, drukt u op de vouwvergrendelingsknop en drukt u op de zadelbuizen totdat het frame uitklapt en u een "klik" hoort. Dit geeft aan dat de rollator in uitgeklatte positie vergrendeld is.

Om het frame in te klappen, trekt u de vouwriem omhoog en klapt u het frame verder in door de zadelbuizen naar elkaar toe te duwen totdat de vouwvergrendelingsknop een "klik" hoort.

WAARSCHUWING! De zitbuizen moeten aan beide zijden stevig vastklikken bij het uitklappen van de rollator. Alle onderdelen moeten stevig vergrendeld zijn voordat de rollator gebruikt kan worden. Het negeren van deze waarschuwingen kan letsel veroorzaken.

Hoogteverstelling van de duwstang

Om de hoogte van de duwstang aan te passen, draai je de hoogteverstellingsknop los en schuif je de stang naar de gewenste stand.

Draai de knop vast en herhaal dit voor de andere stang.

OPMERKING: Beide stangen moeten altijd op dezelfde hoogte staan. De juiste hoogte van de duwstangen moet altijd op polshoogte van de gebruiker zijn wanneer deze staat met de armen langs het lichaam.

Remmen

De remmen kunnen geleidelijk worden geactiveerd door de remhendels met toenemende kracht omhoog te trekken. De remmen zijn volledig ingeschakeld wanneer de remhendels de handgrepen raken en de rollator volledig tot stilstand komt. Laat de remhendels los om te stoppen met remmen. De rollator is ook voorzien van een parkeerrem. Om de parkeerrem in te schakelen, duwt u de remhendels naar beneden. Om de parkeerrem uit te schakelen, trekt u de remhendels terug naar de neutrale stand.

WAARSCHUWING! Schakel de parkeerrem altijd in wanneer u de rollator niet gebruikt! Wanneer u de rollator op een oneffen ondergrond plaatst, moet u altijd de parkeerrem inschakelen!

WAARSCHUWING! De remmen moeten altijd vergrendeld zijn wanneer de rollator geparkeerd staat! Gebruik de zitting nooit als de remmen niet vergrendeld zijn! Leun tijdens het zitten nooit achterover. Het is aan te raden alleen op het voorste gedeelte van de zitting te zitten. Ga niet op de tas zitten.

Reflectoren

De rollator is aan alle zijden voorzien van reflectoren, inclusief op de duwstangen, de tas en de zijanten van het frame:



Kantelpedaal

Het kantelpedaal maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om obstakels te ontwijken door de rollator achterover te kantelen. Het kantelpedaal is in het frame geïntegreerd.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Accessoires

Het apparaat kan worden uitgerust met de volgende accessoires (behoren niet tot de standaarduitrusting):


Het apparaat kan worden uitgerust met de volgende accessoires (niet standaard inbegrepen):

- ✓ Vaste zitting
- ✓ Dienblad
- ✓ Afsluitbare tas met ritssluiting
- ✓ LED-lampjes wit/rood
- ✓ Houder voor zuurstoffles
- ✓ Parapluhouder
- ✓ Ruggordel H=200 mm
- ✓ Netzak
- ✓ Rode bel

Technische gegevens

Panda Comfort rollator	312601, 312603
Beschikbare kleuren	Donker blauw, rood
Hoogte van de duwgrepen (verstelbaar) / Hoogte van het product	77,5 – 99,1 cm
Aanbevolen gebruikershoogtes	160 – 200 cm
Zithoogte	59 cm
Afmetingen van de zitting (B x D)	45,5 x 19 cm
Totale breedte uitgevouwen	77,5 x 65 x 77,5-99,1 cm
Totale breedte ingeklapt	77,5 x 26,4 x 77,5-99,1 cm
Breedte tussen duwhandgrepen	45,5 cm
Lengte	77,5 cm
Draaicirkel	89,5 cm
Gewicht zonder accessoires	8,82 kg
Gewicht met accessoires	9,44 kg
Max. gewicht gebruiker / tasbelasting	150 kg / 5 kg
Remmen	2 met parkeerfunctie
Wielmaten (voor / achter)	285 x 44
Materiaal	Aluminium frame, wielen van PP en rubber.

Productlabel

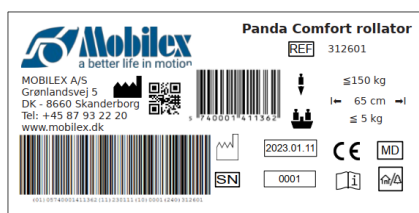

Zorg en onderhoud

Alledaags vuil kan worden verwijderd met standaard schoonmaakmiddelen en een spons of zachte doek. Controleer de specifieke productinformatie en gebruik alleen commerciële schoonmaakproducten die geschikt zijn voor reiniging. Gebruik voor desinfectie alleen desinfectiemiddelen die zijn gecertificeerd voor gebruik met medische hulpmiddelen en die lokaal verkrijgbaar zijn.

Wielen kunnen worden gereinigd met heet water en een mild schoonmaakmiddel. Na het schoonmaken moeten de wielagers regelmatig worden gesmeerd met olie of wanneer de wielen beginnen te piepen.

Ondanks de stevige constructie en het gebruik van resistente materialen is het product onderhevig aan slijtage. Het wordt daarom aanbevolen om het product regelmatig te laten controleren door een professionele onderhoudsdienst.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Wij raden het volgende aan:

- Reiniging en desinfectie van het product
- Het frame controleren op verbuigingen, schade, slijtage of corrosie
- Slijtageonderdelen controleren en indien nodig vervangen
- Algemeen opnieuw vastdraaien van de onderdelen

Aanbevolen levensduur: Normaal gesproken 10 jaar, afhankelijk van het gebruik.

Opslag: We raden aan om het product op een droge plaats te bewaren bij temperaturen boven 0 °C.

Vervoer

Het wordt aanbevolen om het apparaat op te vouwen voor transport. Het apparaat moet stabiel en veilig worden vervoerd, zonder risico op plotselinge of gevaarlijke bewegingen tijdens het transport.

Hergebruik

Het product is geschikt voor hergebruik. Voordat een nieuwe gebruiker het product overneemt, moet het apparaat technisch worden gecontroleerd en gedesinfecteerd

Foutopsporing:

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De rollator is moeilijk te besturen of te duwen.	Vuil tussen de wielen en de voorvork.	Verwijder vuil of haar tussen de wielen en de voorvork.
De remmen werken niet of werken slechts aan één kant.	De remblokken zijn versleten, of de remmen zijn niet correct afgesteld.	Stel de remmen af. Vervang de remblokken indien nodig. (→ servicecentrum)
De zitting past niet op het frame tijdens het uitklappen van de rollator.	Het vergrendelingsmechanisme bevindt zich in een verkeerde positie of is defect.	Controleer of het vergrendelingsmechanisme in de juiste positie staat. Vervang het indien nodig (→ servicecentrum)

Afvoer van het product

Het product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid en moet naar het plaatselijke recyclingcentrum worden gebracht.

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:

- Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
- Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
- Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer(UDI) en de productiedatum (mdd).
VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**

2. Garantie bepalingen:

- Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
- De garantietermijn van het frame bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
- De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.
- Vervangen onderdelen ontvangen 6 maanden garantie vanaf datum van reparatie, mits de onderdelen origineel zijn.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Klein chemisch afval		Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
	Distributeur		Binnen en buiten te gebruiken
	Maximaal laadgewicht tas		Maximaal gewicht
	Maximale breedte		Medisch hulpmiddel
	Droog opslaan		Niet in volle zon

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Distributeur
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Mobilex rollator Panda Comfort

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-12-2025	Auteur:	R. Keuning