

Gebruiksaanwijzing



Elastische compressie kniebrace BRACE3541

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	02-10-2025	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Producttype + artikelnummer:

Elastische compressie kniebrace (BRACE3541)

Distributer's name: Premis Medical BV
Business: De Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245

Product: BRACE3541
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 0843620101325, 08435620101318, 08435620101301, 08435620101332, 08435620101349

Omschrijving van het product:

Geïntegreerde compressiebanden helpen de knie te stabiliseren. Deze tapes "vergrendelen de knieschijf" om overmatige inversie en eversie van de knie te voorkomen. Stretchmateriaal biedt compressie en warmte rond het kniegewricht. Maakt vrijere maar veiligere kniebewegingen mogelijk tijdens sport en dagelijkse activiteiten. Kan comfortabel onder kleding worden gedragen.

.Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Variaties:

Elastische compressie kniebrace large	BRACE3543L
Elastische compressie kniebrace extra large	BRACE3543XL
Elastische compressie kniebrace extra extra large	BRACE3543XXL
Elastische compressie kniebrace small	BRACE3543S
Elastische compressie kniebrace medium	BRACE3543M



S	36 – 39 cm (14 – 15.3')
M	40 – 43 cm (15.4 – 16.9')
L	44 – 47 cm (17 – 18.5')
XL	48 – 52 cm (18.6 – 20.5')



Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	02-10-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Elastische compressie kniebrace BRACE3541

Beoogd gebruik

- Lichte knie-instabiliteit
- Gewrichtsvocht
- Ontstekingen van zowel traumatische oorsprong als veroorzaakt door eerdere ziekten, postoperatieve en posttraumatische irritatie (afterspans) of peesontstekingen.
- Ondersteuning en bescherming bij sport en werk.

Specificaties

Afmetingen	Small 36-39 cm Medium 40-43cm Large 44-47cm Extra large 48-52cm
Materiaal: Taping:	75% nylon, 25% spanex 100% polyelastomeren

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1 x Compressie kuitmouw / brace

Aanbevelingen voor behoud en reiniging

- Was het product met de hand met een vochtige doek en een neutrale zeep. Niet wassen in de wasmachine of chemisch laten reinigen.
- Gebruik een droge en schone handdoek om het meeste vocht te absorberen en laat het drogen op kamertemperatuur. Niet in de droger gebruiken, niet strijken en niet blootstellen aan directe warmtebronnen zoals kachels, heaters, radiatoren, direct zonlicht, enz.
- Gebruik tijdens het gebruik of tijdens het wassen geen alcohol, zalven, bleekmiddel of andere oplosmiddelen. Houd er rekening mee dat wasmiddelresten de huid kunnen irriteren en het product kunnen aantasten als het artikel niet goed is gedroogd.

Waarschuwingen

- Het gebruik van dit product is afhankelijk van de aanbevelingen van de voorschrijvend arts; het mag daarom niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voorgeschreven.
- Raadpleeg uw arts voor gebruik bij diabetes of problemen met de bloedsomloop. – Als u op enig moment jeuk, pijn of enig ander ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg uw arts of fysiotherapeut.
- Bewaar het product in de originele verpakking wanneer u het niet gebruikt.
- Houd u bij het afvoeren van de verpakking en het product strikt aan de wettelijke voorschriften van uw gemeente.

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

- Garantie uitsluitingen:
 - Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
- Garantiebepalingen:
 - Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - De garantietermijn van het product bedraagt 36 maanden vanaf datum van aanschaf. (6 maanden op de batterijen)

Uitleg symbolen:

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	02-10-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing

Elastische compressie kniebrace BRACE3541

Symbool	omschrijving	Symbool	Omschrijving
	Veiligheidsvoorschriften		Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
	Distributeur		Batch nummer
	Artikelnummer		Medisch hulpmiddel

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij, het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Distributeur
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Uitleg

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	02-10-2025	Auteur:	R. Keuning

Pagina	4 van 4
Doc.nr.	G.2.1.4.7 BRACE3541
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	02-10-2025

Gebruiksaanwijzing



Elastische compressie kniebrace BRACE3541

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	02-10-2025	Auteur:	R. Keuning