

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	17-03-2025	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Distributor's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
3931 NG Woudenberg
The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: Russka Vital Plus
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 04048792039316, 04048792039255, 04048792046215,

Producttype + artikelnummer:

Variaties:

ROVITALPL62IJSBLAUW	Ijsblauw 62cm	ROVITALPL54IJSBLAUW	Ijsblauw 54cm
ROVITALPL62MOKKA	Mokka 62cm	ROVITALPL54MOKKA	Mokka 54cm
ROVITALPL62KRROOD	Kersenrood 62cm	ROVITALPL54KRROOD	Kersenrood 54cm

Past dit product bij u?

De rollator die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of deze specifieke rollator geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh): Rollator	Handvathoogte van 74 tot 101,5 cm (62cm) of 66 tot 85 cm (54cm) instelbaar. Zithoogte: 62 cm of 54cm Zitting: 36,5/45 cm x 18,5cm
Productgewicht:	7,12 kg (62cm) of 6,96 kg (54 cm)
Maximaal gebruikersgewicht:	150 kg
Productafmetingen (lxbxh) tas:	32x15x28cm
Productgewicht tas:	380 gr
Maximaal gebruikersgewicht tas:	5 kg

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

Rollator met frame, voorzien van:
Anatomische handvaten, loopparkeerremmen, zitting, een zitbreedte van 45 cm, opvouwbeveiliging en Comfort PU banden.



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Pagina 2 van 11

Document G.1.1.9.1
ROVITALPL62

Procedure-
verantwoordelijk Kwaliteitscoördinator

Revisiedatum 17-03-2025

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Controleer of de rollator in perfecte staat is telkens voordat u hem gebruikt.
2. Controleer de volgende onderdelen en zorg ervoor dat:
 - a. Zijn alle schroeven, moeren en andere onderdelen stevig vastgedraaid
 - b. Zijn wieloppervlakken zijn intact
 - c. Zijn de hoogte verstelschroeven stevig vastgedraaid
 - d. Functioneren de remmen als parkeerrem als handrem
 - e. Vertoont het frame, de gelaste verbindingen en kunststof elementen geen duidelijke slijtage
 - f. Zijn wielen en wielvorken vrij van vuil en draaien de wielen soepel
3. Gebruik geen beschadigde of defecte rollator!
 - Zorg ervoor dat de rollator voor elk gebruik correct is vastgezet.
 - Activeer altijd de parkeerrem wanneer u de rollator stopt of parkeert. Gebruik de handremmen altijd langzaam, gelijkmatig en aan beide tegelijk.
 - Het remeffect kan worden verminderd als het bandenoppervlak versleten is, Controleer regelmatig de remwerking van de remmen,
 - De rollator mag alleen worden gebruikt op stevige en vlakke ondergrond. Er is een risico op uitglijden op vuile, natte, bevroren of met sneeuw bedekte grond! Het remvermogen is ook beperkt. Pas uw manier van bewegen en lopen aan op deze gevaren.
 - Op gladde oppervlakken zoals tegels, stenen vloeren, PVC etc. kunnen de wielen blokkeren bij het remmen onder bepaalde omstandigheden. Controleer daarom de remprestaties van uw rollator zorgvuldig op deze vloeren en pas uw manier van bewegen en lopen hierop aan. Als u op de rollator wilt zitten, moet u er ook voor zorgen dat de wielen voldoende grip hebben op de ondergrond wanneer de remmen zijn ingeschakeld en dat de rollator niet kan wegglijden. Bij gebruik van het zitje dient u vooraf de rollatorremmen op de parkeerstand te zetten, om weggrollen te voorkomen.
 - Bij een hogere loopsnelheid, vooral bij het afdalen, kunnen de voorwielen gaan wiebelen en scheef gaan staan. Hierdoor kan de rollator onbedoeld vastlopen of stoppen, wat kan leiden tot een valrisico. Het is daarom essentieel dat u een gematigde loopruimte aanhoudt, vooral bij het afdalen, en dat u de vier wielen gelijkmatig belast en altijd tussen de handgrepen door loopt.
 - De rollator mag niet worden gebruikt als ondersteuning bij het opstaan vanuit een gehurkte of zittende positie! Hij mag niet worden gebruikt voor het vervoeren van voorwerpen zwaarder dan 5 kg of personen.
 - De maximaal toegestane belasting van de rollator is 150 kg. Dit is inclusief de maximale bagagebelasting van 5 kg in de tas. Deze dient niet te worden overschreden.
 - De meegeleverde tas is ontworpen voor een maximale bagagebelasting van 5 kg. De tas mag niet worden overbelast. Gebruik de tas alleen voor het vervoeren van voorwerpen.
 - Trek of draag de rollator niet aan de zitting, de opvouwbare band of de remkabels. Til de rollator alleen op indien u hier fysiek toe in staat bent en til de rollator niet boven uw macht uit. De rollator weegt 7,12 kg Til vanuit uw benen en niet vanuit uw rug.
 - Til de rollator uitsluitend op door het frame vast te pakken. De rollator is niet geschikt om te worden getild vanaf de handvaten, duwbuizen, wielen.
 - Zorg ervoor dat de handgrepen op de juiste hoogte voor de gebruiker zijn afgesteld om een verkeerde gewichtsbelasting of vallen te voorkomen. Houd altijd beide handgrepen vast; anders kunt u uw evenwicht verliezen. Wij raden u aan om tussen de handgrepen door te lopen en zo recht mogelijk te lopen. Let er bij het lopen op dat u uw voeten niet stoot tegen de wielen of de opstapkrak of uw benen tegen de kruisbeugel stoot.
 - Zorg ervoor dat uw handen of kleding niet in contact komen met de bewegende delen van de rollator!
 - Wees extra voorzichtig bij het in- en uitklappen van de rollator. Dit geldt met name voor scharnieren onder de zitting of in het midden van de kruisbeugel.
 - De rollator moet op het trottoir worden gebruikt. De rollator mag niet in het verkeer worden gebruikt. Voor uw persoonlijke veiligheid op de weg is het raadzaam om extra reflectoren op uw kleding te dragen, naast de reflectoren die al aan alle vier de zijden aan de rollator zijn bevestigd.
 - Ga niet op de rollator zitten als u met het openbaar vervoer reist. Parkeer de rollator met de rem erop, zodat deze niet kan omvallen of weggrollen. Zoek een zitplaats in de buurt.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Pagina 3 van 11

Document G.1.1.9.1
ROVITALPL62

Procedure-
verantwoordelijk Kwaliteitscoördinator

Revisiedatum 17-03-2025

- Als u (tram) sporen moet oversteken, rijd er dan indien mogelijk haaks en snel overheen. Zorg ervoor dat de wielen niet in de rails vast komen te zitten.
- Wees voorzichtig in de buurt van kinderen. Kinderen mogen niet met de rollator spelen!
- Hang geen handtassen of draagtassen aan de handgrepen, anders kan de balans van de rollator verstoord raken.
- Voer geen instellingen of wijzigingen door die de van de constructie afhankelijke veiligheid in het gedrang brengen. De vervanging van componenten, zoals b.v. wielen mag alleen door de dealer worden uitgevoerd.
- Gebruik uitsluitend door Premis of Russka goedgekeurde of door Premis of Russka speciaal ontwikkelde hulpstukken. Neem daarvoor ook de gebruiksaanwijzing van de betreffende toebehoren in acht
- In sterk zonlicht kunnendelen van de rollator, zoals de handgrepen en de zitting, heet worden. In all gevallen moet huidcontact worden vermeden om brandwonden te voorkomen. Zorg ervoor dat u uw rollator afdekt of op een schaduwrijke plek parkeert.
- Vermijd huidcontact met de metalen onderdelen van de rollator als de rollator gedurende een langere periode aan lage temperatuur blootgesteld was om eventuele bevrozing te voorkomen
- Houd de rollator op een veilige afstand tot open vuur.
- Vermijd een botsing van de rollator met kozijnen, meubelstukken en dergelijke. Ga de veilige afstand van de rollator in geparkeerde toestand na. Het omvallen van de rollator kan tot beschadigingen aan kozijnen, verbindingselementen en lasnaden leiden
- Voorkom ook dat er spanning op de rollator komt te staan als deze is ingeklapt! Dit kan het frame, de verbindingselementen en de lasnaden beschadigen.
- Gebruik de rollator niet op trappen of roltrappen.
- Ga niet op de rollator staan.
- Leun niet op de remhendel.
- Laat de rollator jaarlijks preventief onderhouden om slijtage tijdig te ondervangen.
- Neem bij vragen contact op met uw dealer.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1x Vital Plus rollator inclusief tas en stokhouder

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning


Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Beschrijving van de componenten:

A. Handvat	E. Remkabel	I. Riem voor opvouwen rollator	M. Magnetisch slot
B. Remhendel	F. Zijframe	J. Remblokken en Randgeleiding	N. Stokhouder
C. Zitje	G. Scharnier	K. Tasje	O. Voorwiel, bestuurbaar
D. Hoogteverstelschroef	H. Stapondersteuning	L. Tashouder	P. Achterwiel met rem

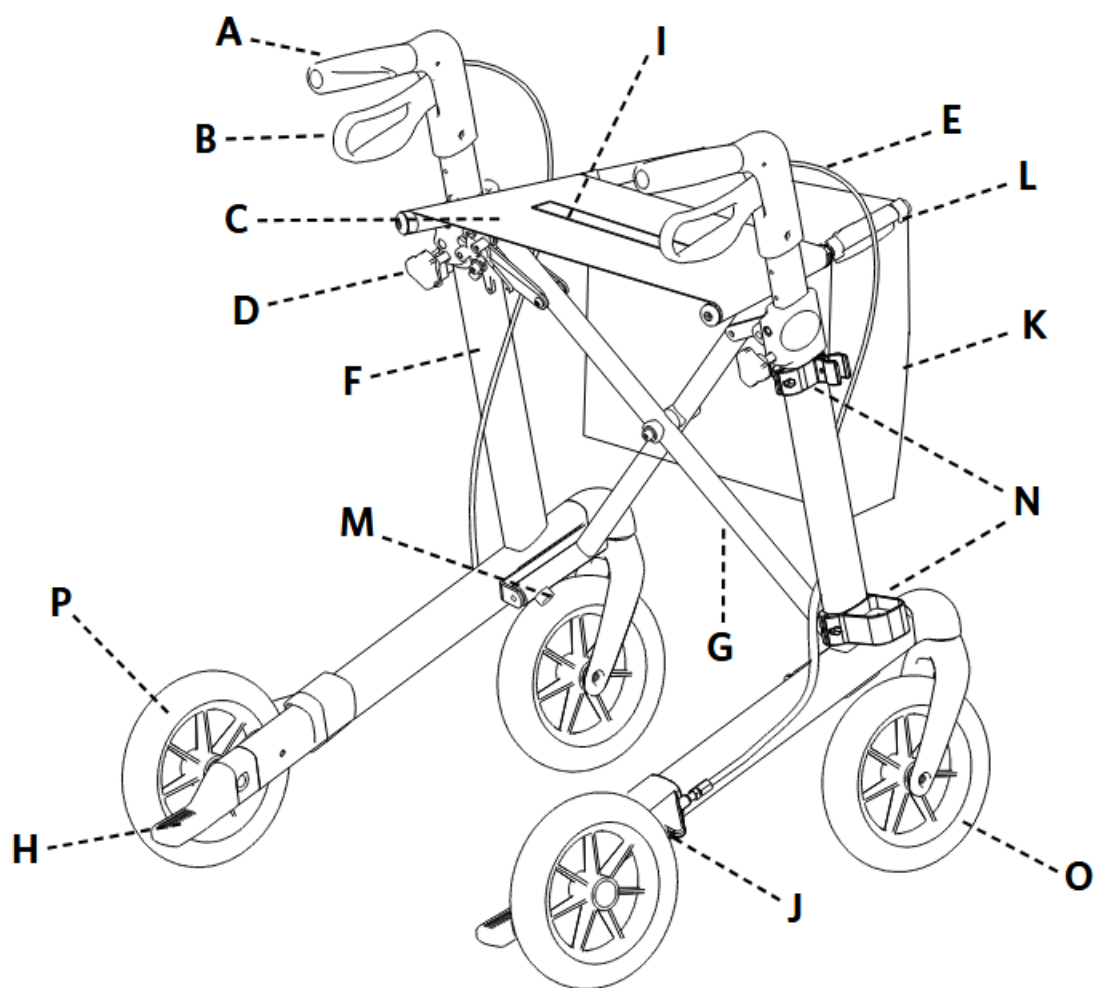

Beoogd gebruik van het product:

De rollator ondersteunt mensen met een beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld: Mensen met loopproblemen of een ernstig beperkt loopvermogen, in hun mobiliteit en biedt hen daardoor een grotere actieradius. Bewegen heeft een positief effect op de bloedsomloop, coördinatie, evenwicht en het welzijn. Deze rollator is ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik. Het is uitgerust met een afneembare tas. De rollator biedt een zitplaats voor korte pauzes. Hij is opvouwbaar en daardoor handig en ruimtebesparend om mee te nemen op excursies en reizen. De rollators mag niet worden gebruikt door mensen met een zintuiglijke beperking, ernstige evenwichtsstoornissen of mensen die niet kunnen zitten. De gebruiker moet over voldoende cognitieve vaardigheden en voldoende fysieke vaardigheden beschikken om een rollator te kunnen gebruiken.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Installeren voor gebruik:

Montage

Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg.

Het openen van de rollator

1. Trek de duwhandvatten uit elkaar (afb. 1).
2. Duw de zijbalken naar buiten totdat ze vastklikken. De rollator is dan volledig open (afb. 2).
3. Controleer voor gebruik of de vouwvergrendeling goed vastzit, deze wordt hoorbaar en voelbaar onder de stoel vergrendeld.



Afb. 1



Afb. 2

Rollator opvouwen

1. Vouw de rollator op door de riem omhoog te trekken (Afb. 3).
2. Duw de duwhandvatten naar binnen en de rollator in elkaar (Afb. 4). De volledig samengevouwen rollator wordt vergrendeld door magneten (Afb. 5).
3. Wanneer de rollator is opgevouwen, is deze makkelijk te dragen (Afb. 6). Draag de rollator niet aan de remkabels of het trekkoord in de zitting.



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5




Afb. 6

Hoogteverstelling van de handgrepen (afb. 7)

Pas de hoogte van de handgrepen aan zodat de gebruiker rechtop kan lopen, zonder voorover te buigen. Het wordt aanbevolen dat de gebruiker rechtop staat met de armen langs het lichaam tussen de handgrepen. De handgrepen moeten worden aangepast aan de hoogte van de polsen.

1. Draai de hoogteverstellingsschroef D los.
2. Verplaats de handgreep naar de gewenste hoogte.
3. Draai de hoogteverstellingsschroef D vast.

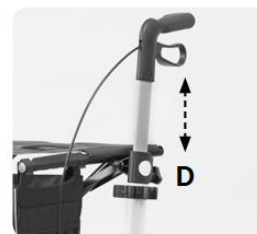

Afb. 7

Stel beide handgrepen op dezelfde hoogte in. De gedrukte nummers aan de binnenkant van de duwhandgrepen helpen u om uw persoonlijke gripniveau eenvoudig weer aan te passen (afb. 8).



Afb. 8

Rem (afb. 9)

Controleer de werking van de remmen voor gebruik.

1. De snelheid wordt verlaagd door de remhendel omhoog te trekken.
2. De parkeerrem wordt geactiveerd door de remhendel omlaag te drukken totdat deze vastklikt.
3. De parkeerrem wordt uit de vergrendelde positie gehaald door de remhendel omhoog te trekken.
4. De rollator mag niet worden voortgeduwd met de parkeerrem erop. Als de rollator wordt voortgeduwd met de parkeerrem erop, kan dit extreme slijtage aan de banden en remmen veroorzaken en hun werking verminderen.
5. Controleer regelmatig de remfunctie. Wij adviseren een controle telkens voordat de rollator gebruikt wordt. De rollator mag niet worden gebruikt met beschadigde remmen of beschadigde wielen.



Afb. 9

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing




Russka rollator Vital Plus

Remmen afstellen (afb. 10)

De remschoen kan worden afgesteld als de remkracht afneemt door slijtage van de wielen. De remmen moeten zo worden afgesteld dat beide wielen gelijkmatig remmen. De afstand tussen de remblok en het wieloppervlak moet ongeveer 2–3,5 mm zijn. Na een vervanging van de wielen moet de reminstelling eveneens nagekeken en, al naar behoefte, opnieuw afgesteld worden.

1. Stel de hendels in op de hoogte die pat bij de gebruiker.
2. Draai de borgmoer los.
3. Stel de remkracht af door de remkabel spanner naar binnen of naar buiten te draaien.
4. Controleer de remfunctie door de wielen te draaien en de remhendels te bedienen. De wielen moeten vrij kunnen draaien, maar onmiddellijk stoppen wanneer de remmen worden aangetrokken. Wanneer de rem wordt geactiveerd, mogen de wielen niet kunnen bewegen.
5. Draai de borgmoer weer stevig vast.
6. Ingeval van onzekerheden adviseren wij u voor de correcte instelling van de rem zich tot uw dealer te wenden.

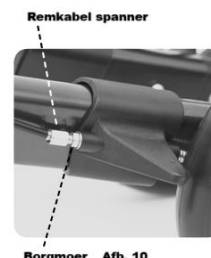

Borgmoer Afb. 10

Zitje

Activeer de parkeerrem voordat u op het zitje gaat zitten. Ga altijd volledig op het zitje zitten met uw rug in de rijrichting. (afb. 11) Leun niet op de zijkanen of naar achteren terwijl u op de rollator zit. Dat kan de stabiliteit van de rollator in gevaar brengen. Gebruik het zitje niet op een hellend oppervlak. Zorg ervoor dat de voorwielen evenwijdig aan de looprichting staan. Het zitje is ontworpen voor een gebruikersgewicht tot 150 kg.



Afb. 11

Obstakels overwinnen met behulp van de opstaphulp

Stap op de opstaphulp om de voorwielen van de rollator omhoog te brengen, zodat u gemakkelijker een drempel, stoeprand of een ander obstakel kunt overwinnen (afb. 12).

De opstaphulp is aan beide zijde van het frame tussen de achterwielen gemonteerd. Voordat U de opstaphulp gebruikt, moet U ervoor zorgen dat U veilig op één een staat. Oefen het gebruik met iemand indien nodig.

Als U een obstakel, bijvoorbeeld een stoeprand, moet overwinnen, rij dan ,et de rollator recht in de richting van het obstakel (afb. 13). Trek de remhendels met beide handen omhoog zodat beide wielen geremd worden.

Druk met Uw linker- of rechervoet zachtjes op de opstaphulp en trek tegelijkertijd beide handgrepen naar U toe (afb. 14). Wanneer het zwaartepunt van de rollator zich boven de achterwielen bevindt, laat U de remhendels gelijktijdig en langzaam los zodat U de rollator op de achterwielen in de richting van het obstakel kunt laten rollen (afb.15). Trap de remmen weer gelijkmatig in. Nu kunt U de voorwielen met geactiveerde remmen op het obstakel laten zakken. Laat de remmen los en duw de rollator naar voren tot hij volledig op het obstakel staat. (afb. 16).



Afb. 12



Afb. 13



Afb. 14



Afb. 15



Afb. 16

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Stokhouder

Met de stokhouder kunt u uw wandelstok eenvoudig en veilig aan de rollator bevestigen en altijd bij de hand hebben wanneer u hem nodig hebt. U kunt de stokhouder aan het rechter- of linkerframe van uw rollator bevestigen. Draai de bevestigingsschroeven los met het meegeleverde gereedschap en plaats het kleine mandje aan de onderkant rond het verticale frame (afb. 18). Zorg ervoor dat het mandje naar buiten wijst. Steek de bevestigingsschroef door de daarvoor bestemde opening (afb. 19). Draai de schroef vast zodat de stokhouder niet los kan raken (afb. 20). Ga op exact dezelfde manier verder met het bevestigen van de bovenste beugel. Deze wordt aan het bovenste uiteinde van de verticale stang van het frame bevestigd.

Bewaar het gereedschap op een veilige plaats voor het geval u de stokhouder wilt verplaatsen of verwijderen.

Wanneer u uw stok in de stokhouder wilt plaatsen of verwijderen, zet u de remmen van uw rollator stevig vast zodat deze niet weg kan rollen. Om uw stok te bevestigen, plaatst u eerst de rubberen pad in het onderste mandje van de stokhouder. Druk vervolgens de steel van uw stok in de bovenste clip van de stokhouder totdat deze vastzit. Om de stok te verwijderen, trekt u deze stevig uit de clip.


Een bevestigde stok kan uit uw rollator steken. Wees extra voorzichtig zodat u de stok niet ergens aan vast laat haken of andere mensen ermee verwondt.



Afb. 17



Afb. 18

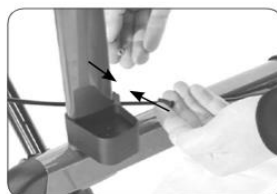

Afb. 19



Afb. 20


Onderhoud van het product:

De rollator mag alleen worden gebruikt als loophulpmiddel. Houd de rollator vrij van vuil, zodat deze functioneel blijft. De rollator kan worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel en een doek en vervolgens worden afgespoeld en gedroogd. Droog de rollator grondig af na het reinigen of blootstelling aan regen. De remblokken en veren dienen ook regelmatig te worden gereinigd.

De rollator mag alleen worden gedesinfecteerd door een specialist. Het product kan worden gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel met 70-80 procent ethanolgehalte. Desinfectiemiddelen die chloor of fenol bevatten, mogen niet worden gebruikt. Gebruik geen bijtende oplosmiddelen. Gebruik de rollator niet bij temperaturen onder -35°C of boven $+60^{\circ}\text{C}$.

Afgezien van kleine correcties aan de lak, het verwisselen van wielen of het afstellen van de remmen, dienen alle reparaties te worden uitgevoerd door een vakhandelaar.

Stuur uw rollator voor regelmatige controles naar uw dealer. Hij kan slijtage detecteren en indien nodig onderdelen vervangen. Als u op enigerlei wijze constateert dat de remwerking niet naar behoren functioneert, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

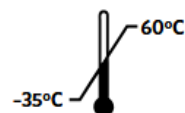

Tas

Kleine spullen kunnen gemakkelijk in de tas worden meegenomen. De binnenzakken zijn geschikt voor het opbergen van spullen zoals sleutels of uw portemonnee. De tas is ontworpen om tot 5 kg te dragen. Hij kan eenvoudig worden opgehangen en weer worden verwijderd met behulp van de geïntegreerde handgrepen (afb. 21+22).



Afb. 21



Afb. 22

Hergebruik

Het product kan worden hergebruikt. Het moet worden gereinigd en gedesinfecteerd volgens de instructies. Het moet worden geïnspecteerd door specialisten op eventuele gebreken en vervolgens worden goedgekeurd voordat het opnieuw kan worden gebruikt. Bestel onze hygiëne- en onderhoudsrichtlijnen.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Voor een regelmatige verzorging en onderhoud van het product vindt u hierna een onderhoudstabel en een hygiëneplan:

Onderhoudstabel	
Wanneer	
Telkens vóór hergebruik	
Wat	In acht te nemen
Controle van de algemene toestand Visuele controle van alle frameonderdelen met inbegrip van de lasnaden op vervorming, beschadiging, slijtage en corrosie.	Bij vaststelling van gebreken vervangt u de betreffende productonderdelen.
Controle van de handgrepen door visuele controle en draaipoging	Bij vaststelling van beschadigde of niet meer vast met het frame verbonden handgrepen moet er een vervanging plaatsvinden.
Controle van bandenprofiel en kogellager	Bij vaststelling van slijtage of barsten moet er een vervanging van de wielen uitgevoerd worden.
Controle van de opvouwbeveiliging	Wanneer er vastgesteld wordt dat de werking van het klapmechanisme minder efficiënt is, moet het gerepareerd of vervagen worden.
Controle van de verbindingselementen op vaste zitting	Bij vaststelling van losgeraakte of ontbrekende schroeven, moeren, klinknagels etc. moeten deze vast aangedraaid/-getrokken, gecompleteerd resp. vervangen worden.
Functionele controle van de reminstallatie Bedrijfsrem tot aan de aanslag bedienen. De wielen mogen zich bij een krachtige verschuiving niet meer draaien. Parkeerrem vastzetten doordat de remhefbomen naar beneden gedrukt worden totdat ze vastklikken. De wielen mogen nu bij een krachtige verschuiving niet meer draaien.	Bij een defecte rem moet er een controle van remspeling, Remkabels, remblokjes en wielen en eventueel een vervanging van het defecte productonderdeel.

Laat uw rollator regelmatig door uw vakhandelaar onderhouden. Hij kan eventuele slijtage vaststellen en eventueel bouwdelen vervangen. Wanneer u bij de regelmatige controle van de remkracht van de remmen van uw Rollator fouten opvallen, dan dient u zich onmiddellijk in vertrouwen tot uw vakhandelaar te wenden.

Opslag

Bewaar de rollator licht en stofvrij op een droge plaats. Bewaar hem niet in de buurt van een warmtebron.



Afvalverwerking

Gooi de rollator niet weg bij het normale huisvuil. Vraag uw plaatselijke recyclingbedrijf hoe u hem op de juiste en milieuvriendelijke manier kunt afvoeren.

Technische specificaties:

Gebruikte materialen:	Aluminium, lak en plastic
Productafmetingen (lxbxh):	Handvathoogte van 74 tot 101,5 cm (62cm) of 66 tot 85 cm (54cm) instelbaar. Zithoogte: 62 cm of 54cm Zitting: 36,5/45 cm x 18,5cm
Productgewicht rollator:	7,12 kg (62cm) of 6,96 kg (54 cm)
Maximaal gebruikersgewicht:	150 kg
Gebruikte materialen:	100% Polyester
Tas	
Productafmetingen (lxbxh):	32x15x28cm
Tas	
Productgewicht tas:	380 gr
Maximaal gebruikersgewicht:	5 kg
Tas	

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:

- Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
- Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
- Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (MDF).

VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**

Garantie bepalingen:

- Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
- De garantietermijn van het frame bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
- De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.
- Vervangen onderdelen ontvangen 6 maanden garantie vanaf datum van reparatie, mits de onderdelen origineel zijn.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Klein chemisch afval		Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
	Distributeur		Machinewas 40 graden
	Niet bleken		Niet in de droger
	Niet strijken		Niet naar stomerij
	Droog opslaan		Niet in volle zon

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
De wielen rollen niet meer	De lagers zijn (en wielas) versleten	Lagers (en wielas) vervangen
De handvaten verdraaien of komen los	De handvaten zijn uitgerekt of versleten	De handvaten vastlijmen met contactlijm of vervangen
Één van de wielen zweeft	1. De rollator is niet goed uitgekapt OF 2. Het frame is scheef	1. De rollator volledig uitklappen OF 2. Het frame laten repareren
Het in- en uitklappen van de nieuwe rollator gaat stroef	De rollator is nieuw	De rollator meermaals achterelkaar uit- en inklappen tot het versoepelt.
Ik krijg last van mijn handen/armen/schouders bij het lopen	1. De duwbuizen staan verkeerd afgesteld OF 2. U heeft last van trillingen door oneffen ondergronden	1. De duwbuizen juist afstellen. OF 2. De PU banden vervangen
De remmen remmen niet voldoende	1. Het remschoentje is versleten OF 2. De remmen zijn verkeerd afgesteld	1. Het remschoentje vervangen OF 2. De remmen juist afstellen
Ik krijg de parkeerrem moeilijk omlaag/omhoog gedrukt.	De remhendel is te strak afgesteld	Draai de schroeven in het remhuis voorzichtig een stukje losser tot de remhendel goed te bedienen is. Let daarbij op dat de remhendel niet te veel speling krijgt.

Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Distributeur
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Russka rollator Vital Plus

Pagina 11 van 11

Document G.1.1.9.1
ROVITALPL62

Procedure-
verantwoordelijk Kwaliteitscoördinator

Revisiedatum 17-03-2025

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	17-03-2025	Auteur:	R.Keuning