

Gebruiksaanwijzing



Anti-slip mat BA2401

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	17-06-2025	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Producttype + artikelnummer:

Anti-slip mat BA2401

Distributer's name: Premis Medical BV
Business: De Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245

Product: BA2401
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08436548964733

Omschrijving van het product:

Rubber Antislipmat voor Bad en Douche XL

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Productafmetingen	104 x 40 cm
Productgewicht	1,6kg
Materiaal	Rubber
Zuignappen	

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Variaties:

Rubber Antislipmat voor Bad en Douche XL	BA2401
--	--------

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1 x Rubber anti-slip mat voor bad en douche



Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	17-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Anti-slip mat BA2401

Pagina	2 van 4
Doc.nr.	G.2.2.14.1 BA2401
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	17-06-2025

Beoogd gebruik van het product:

De rubber antislipmat voor bad en douche is de perfecte oplossing! Met geavanceerde antislip technologie zorgt deze mat voor een stevige grip, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over uitglijden op natte oppervlakken.

Veiligheid in de Badkamer – Voorkom Uitglijden

Uitglijden in de badkamer is een veelvoorkomend probleem. De rubberen antislipmat voorkomt dit effectief door het gebruik van innovatieve antislip technologie. De mat heeft stevige rubberen noppen die zorgen voor een superieure grip op zowel bad als douchevloer. Dankzij deze technologie kun je met vertrouwen je bad nemen of douchen, zonder het risico op een valpartij. Daarnaast zijn de matten bovendien ontworpen om ook bij intensief gebruik hun grip te behouden, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over slijtage.

Voordelen van de rubber anti-slip mat:

- Verbeterde grip voor meer veiligheid in de badkamer
- Comfortabel voor je voeten tijdens het badden of douchen
- Duurzaam en slijtvast, ideaal voor dagelijks gebruik
- Makkelijk te onderhouden en wasmachinebestendig

Onderhoud van het product:

De rubber antislipmatten zijn niet alleen veilig, comfortabel en onderhoudsvriendelijk, maar ook uiterst duurzaam. De mat is gemaakt van hoogwaardig rubber, wat zorgt voor lange levensduur en weinig slijtage, zelfs bij dagelijks gebruik. Bovendien is de mat heel eenvoudig in onderhoud – je kunt hem snel afspoelen of zelfs wassen in de wasmachine voor een frisse, schone mat.

- Slijtvast en bestand tegen dagelijks gebruik
- Eenvoudig te reinigen voor langdurig gebruik
- Machinewasbaar voor optimaal onderhoud
- Perfecte pasvorm voor elke badkamer

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur. De volledige CE sticker nummers moeten op de Factuur/pakbon staan. Dit is voor de Tracibility.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	17-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Anti-slip mat BA2401

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Veiligheidsvoorschriften		Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Distributeur
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	17-06-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Anti-slip mat BA2401

Pagina 4 van 4

Doc.nr. G.2.2.14.1
BA2401

Procedure-
verantwoordelijke Directie

Revisiedatum 17-06-2025

Uitleg

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	17-06-2025	Auteur:	R. Keuning