

Gebruiksaanwijzing



Wandelstok opvouwbaar met verlichting WA481

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	04-03-2026	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Producttype + artikelnummer:

Distributer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: WA4015SG links en rechts
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08436548965105

Omschrijving van het product:

Verstelbare wandelstok met anatomische handgreep

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Materiaal:	Aluminium en ABS
(Productafmetingen)	Verstelbaar in hoogte 84 tot 97 cm
Lengte handgreep:	15 cm
(Productgewicht:)	400 gr.
(Maximaal gebruikersgewicht:)	100 kg.
Verlichting:	Witte LED
Batterijen:	AAA (niet meegeleverd)
Diameter voet:	9 cm

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Variaties:

Wandelstok opvouwbaar met verlichting	WA481
---------------------------------------	-------

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Overschrijd nooit het maximaal gebruikers gewicht
2. Controleer wekelijks de rubberdoppen
3. Stel het handvat af op de goede hoogte

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1 stuks wandelstok opvouwbaar met verlichting incl. gebruiksaanwijzing (batterijen niet inbegrepen)

Beoogd gebruik van het product:

Lopen

- Loop altijd rechtop met de wandelstok vlak langs uw lichaam.
- Lopen met de wandelstok, deze moet zich altijd bevinden aan de gezonde kant van het lichaam, Zet het zwakke been tegelijk met de wandelstok naar voren en daarna het gezonde been.

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	04-03-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Wandelstok opvouwbaar met verlichting WA481

Traplopen

- Als er een leuning is kunt u deze als steun gebruiken en aan de andere kant de wandelstok gebruiken.
- Zorg er wel voor, indien mogelijk, dat de leuning zich aan de gezonde kant van het lichaam bevindt.
- Trap op: Ga voor de trap staan, steun op de leuning en plaats de wandelstok op de eerste tree, Zet het gezonde been op de eerste tree en zet het zwakke been ernaast.
- Trap af: Steun op de leuning en zet de wandelstok op de eerste tree. Plaats het zwakke been naast de wandelstok en daarna het gezonde been.

Installeren voor gebruik:


1. Voordat u de wandelstok gaat gebruiken dient u deze eerst op de goede hoogte in te stellen.
2. Rechtopstaand is de pols-knokkelhoogte als handvathoogte aangehouden.
3. Draai de wartel los Druk de uitstekende palletjes aan weerszijde tegelijkertijd in, nu kunt u de wandelstok in en uit elkaar schuiven tot de juiste hoogte Let op als dit moeilijk gaat lichte druk op boven kant uitoefenen
4. Als de juiste hoogte is afgesteld, let er dan wel op dat de palletjes aan beide zijden uitsteken
5. er kunnen redenen zijn om de hoogte bij u anders in te stellen, dit wordt meestal door een deskundige bepaald

Contra-indicaties van het product:

Indien u een geamputeerd onderbeen heeft raden wij u af de wandelstok zonder prothese te gebruiken.
Neem contact op met u arts of dat de wandelstok wel een geschikt hulpmiddel voor u is bij chronische aandoeningen is het vaak beter om een rollator of looprek te gebruiken.
Niet aanbevolen voor personen die zwaarder zijn dan 100 kg.

Installeren

Om de wandelstok uit te vouwen, houdt u het handvat vast en laat u de segmenten van de opvouwbare wandelstok naar beneden uitklappen. Om vallen te voorkomen, dient u er altijd voor te zorgen dat de afzonderlijke segmenten van de opvouwbare wandelstok (Afb. 1) goed vergrendeld zijn.

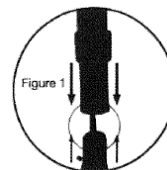

Waarschuwing



Pak de wandelstok NIET vast aan het buitenste deel van het handvat, want dit kan leiden tot breuk.
Pak de wandelstok ALTIJD stevig vast in het midden van het handvat, met uw vingers om de buis.
Haal de Trusty Cane NIET uit elkaar. De wandelstok bevat een elastisch koord.
Ongecontroleerde ontspanning van het elastische koord kan ernstig letsel veroorzaken aan onbeschermde lichaamsdelen, met name de ogen.



Als het elastische koord is doorgesneden, gerafeld of beschadigd, stop dan met het gebruik ervan. Rek het koord niet verder uit dan nodig is om de segmenten uit elkaar te halen of in elkaar te zetten.

Om de hoogte aan te passen:

Draai de draaibare vergrendeling (fig. 2) een paar keer met de klok mee. Druk op de vergrendelingsknop (fig. 3) en trek de handgreep omhoog om de vergrendeling los te maken. Vergeet niet de draaibare vergrendeling weer vast te draaien nadat u de Trusty Cane op de gewenste hoogte hebt ingesteld.

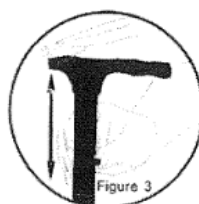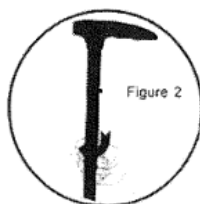

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	04-03-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Wandelstok opvouwbaar met verlichting WA481


Pagina	3 van 5
Doc.nr.	G 1.4.1.50 WA481
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	04-03-2026

Waarschuwing

Om vallen te voorkomen, moet u er altijd voor zorgen dat de afzonderlijke schachtsegmenten stevig vergrendeld zijn en dat de vergrendelingsknop volledig is ingedrukt.



Om de wandelstok weer op te vouwen

Uw Trusty Cane kan eenvoudig worden opgevouwen tot een handzaam reisformaat door de 4 afzonderlijke schachtsegmenten van elkaar te scheiden. Houd elk set schachtsegmenten bij het scharnierpunt vast en scheid ze (Afb. 4). De afzonderlijke schachtsegmenten vouwen zich netjes op (Afb. 5).

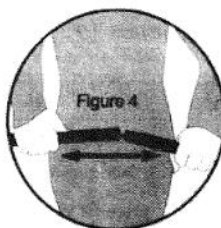

De verlichting van uw Trusty Cane gebruiken

De knop bovenop het handvat van de Trusty Cane (Afb. 6) activeert de verlichting. Door één keer op de knop te drukken, gaat de verlichting aan; door nogmaals te drukken, gaat deze uit. De verlichting gaat na 20 minuten automatisch uit.

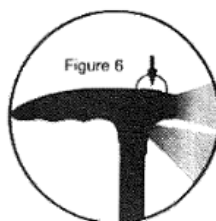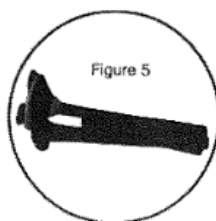

Onderhoud

Om de batterijen te vervangen, gebruikt u een kruiskopschroevendraaier om het batterijcompartiment onder het handvat van de Trusty Cane los te schroeven. Verwijder de lege batterijen en gooi ze op de juiste manier weg. Bij AAA-batterijen moet u de + en – polen correct aansluiten; anders werkt de verlichting niet. Plaats de schroef op het batterijklepje terug en draai deze vast.

Controleer de wandelstok regelmatig op slijtage, zoals rafeling van het elastische koord of slijtage aan het handvat. De rubberen voetjes. Als u tekenen van slijtage ziet, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

Waarschuwing

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	04-03-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing

Wandelstok opvouwbaar met verlichting WA481

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

- Garantie uitsluitingen:
 - Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - Op de wandelstok zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer(UDI) en de productiedatum (mdd).
VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
- Garantie bepalingen:
 - Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt ... maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Artikelnummer		Productiedatum
	Medisch hulpmiddel		Batchcode
	Goedgekeurd door de Europese unie		Gebruiksaanwijzing is online te vinden
	Fabrikant		Let op
	Distributeur		Importeur
	Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Snelle rubberdop slijtage	Verkeerd afgesteld	Stel hem goed af

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij, het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Distributeur
Premis Medical BV. De nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	04-03-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



Wandelstok opvouwbaar met verlichting WA481

Pagina	5 van 5
Doc.nr.	G 1.4.1.50 WA481
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	04-03-2026

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	04-03-2026	Auteur:	R. Keuning