

Gebruiksaanwijzing



Rollator ROHERA

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	01-05-2026	R. Keuning	Eerste uitgave

Producttype + artikelnummer:

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands

Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245

Product: ROHERA
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874860867, 08718874860874, 08718874860881, 0871887480898, 08718874860904

ROHERA – Premis lichtgewicht Rollator, dubbel opvouwbaar

Kleurvarianties:

ROHERABL/GR	Blauw/groen
ROHERAGR	Groen
ROHERARO	Rood
ROHERAWI	Wit
ROHERAZW	Zwart

Omschrijving van het product:

Design lichtgewicht rollator voor binnen- en buitengebruik voorzien van Stokhouder, drinkfleshouder, zitje en rugsteun. Met onder het zitje een stoffen tas. 8 inch wielen, aluminium frame. De rollator is opvouwbaar. De rollator is verkrijgbaar in de frame kleuren blauw/groen, groen, rood, wit en zwart met een zwart zitje en zwarte tas.

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.



Productafmetingen (lxbxh):	Handgriephoogte 80 – 89 cm Lengte 69 cm Breedte 61 cm Breedte opgevouwen 31 cm
Productgewicht:	6,5 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	150 kg
Wieldiameter:	8 inch – 20.32 cm
Andere eigenschappen:	Nylon tas (40x30x22 cm)

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rollator ROHERA

Pagina	2 van 10
Doc.nr.	G.1.1.4.12 ROHERA
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	01-05-2026

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 150 kg dient niet te worden overschreden.
2. Controleer de remkabels en remfunctie voorafgaand aan gebruik.
3. Alle wielen dienen ten alle tijden in contact te zijn met de grond.
4. Gebruik de rollator niet op (rol)trappen, lopende banden of oneven oppervlakken.
5. Denk bij het gebruik van de opvouwbeveiliging om uw vingers, neem de gebruiksinstructies in acht.
6. Til de rollator alleen op indien u hier fysiek toe in staat bent en til de rollator niet boven uw macht uit. De rollator weegt 6.5 kg. Til vanuit uw benen en niet vanuit uw rug.
7. Til de rollator uitsluitend op door het frame vast te pakken. De rollator is niet geschikt om te worden getild vanaf de handvaten, duwbuizen, wielen of onderdelen van de mand en dienbladophanging.
8. Om kantelgevaar of framebreuk van de rollator te voorkomen: hang geen voorwerpen aan de rollator die hier niet voor bedoeld zijn. Gebruik uitsluitend door Premis goedgekeurde of door Premis speciaal ontwikkelde hulpstukken.
9. Breng geen wijzigingen aan op de rollator zonder autorisatie van Premis.
10. Repareer of vervang onderdelen van de rollator uitsluitend met originele onderdelen.
11. Laat de rollator jaarlijks preventief onderhouden om slijtage tijdig te ondervangen.
12. Let bij het lopen op dat u goed tussen de achterwielen van de rollator loopt en zo rechtop mogelijk blijft lopen, om vallen te voorkomen.
13. Gebruik de rollator niet wanneer deze beschadigd of defect is.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

De rollators wordt in een doos geleverd en is opgevouwen voor gemakkelijk transport.

De inhoud is:

- 1 x complete opgevouwen rollator ROHERA inclusief zitje en mandje
- 1 x gebruikershandleiding

De rollator heeft vier wielen en is gemaakt van naadloze buizen, waardoor hij licht en gemakkelijk op te bergen of te vervoeren is. De rollator biedt een uitstekende wendbaarheid en stabiliteit. De duwstangen zijn in hoogte verstelbaar voor een goede pasvorm. Hij is ook voorzien van een zitje en een boodschappentas, zodat de gebruiker kan rusten en kleine spullen kan meenemen.

Beoogd gebruik van het product:

De rollator is ontworpen als hulpmiddel voor mensen met mobiliteitsproblemen, bijvoorbeeld problemen met staan, lopen of zelfstandig zitten. Het helpt deze mensen om gemakkelijk te staan, te lopen en te rusten, zodat ze de meeste dagelijkse taken en routines zonder hulp van anderen kunnen uitvoeren. Elk ander gebruik is verboden.

Indicaties:

Het apparaat is specifiek ontworpen voor personen die extra stabiele ondersteuning nodig hebben tijdens het lopen.

Contra-indicaties van het product:

Het apparaat mag niet worden gebruikt door gebruikers met ernstige problemen met het evenwicht of met een te lage spierkracht om te kunnen staan en lopen, zelfs niet met de extra ondersteuning van een rollator.

De noodzaak en de mogelijkheid van het gebruik van een rollator door de gebruiker moeten altijd worden beoordeeld en geadviseerd door een arts of fysiotherapeut..

Veiligheidsvoorschriften

Zorg ervoor dat deze gebruikershandleiding wordt gelezen door iedereen die het apparaat gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.



Gebruiksbeperkingen

- De zitting van het apparaat mag niet zwaarder belast worden dan 150 kg.
- De duwstang van het apparaat mag niet zwaarder belast worden dan 150 kg.
- De tas van het apparaat heeft een maximale belasting van 5 kg.
- De rollator is ontworpen voor gebruik op vlakke ondergronden, zowel binnen als buiten.
- De rollator is niet bedoeld om zelfstandig voort te bewegen terwijl u erop zit.
- De remmen MOETEN vergrendeld zijn VOORDAT u de zitting gebruikt.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rollator ROHERA



Ongevallen voorkomen

- Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik het apparaat alleen als het in goede technische staat verkeert.
- Breng geen constructieve wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij u schriftelijke toestemming van de fabrikant heeft voor dergelijke wijzigingen.
- Tijdens de verschillende verstellingen die mogelijk zijn aan het apparaat, moet de gebruiker ervoor zorgen dat zijn/haar vingers of andere lichaamsdelen niet bekneld raken tussen twee bewegende onderdelen van het apparaat.
- Het apparaat mag alleen op een stabiele ondergrond worden gebruikt.


Alle wielen **MOETEN** tijdens gebruik **ALTIJD** contact met de vloer hebben. Dit zorgt ervoor dat de rollator goed in balans is en voorkomt ongevallen.

- Wanneer de rollator stilstaat, **MOETEN** de handremmen vergrendeld zijn.



Wees voorzichtig wanneer u dit symbool op het apparaat ziet. Vingers of andere lichaamsdelen van een gebruiker en/of assistent kunnen bekneld raken tussen de onderdelen van het apparaat tijdens het vouwen, uitvouwen of verstellen van het apparaat. Wees uiterst voorzichtig bij het verstellen van het apparaat. Let op de afmetingen van de openingen tussen de elementen van het apparaat om te voorkomen dat uw vingers of andere lichaamsdelen bekneld raken.

Productdetails

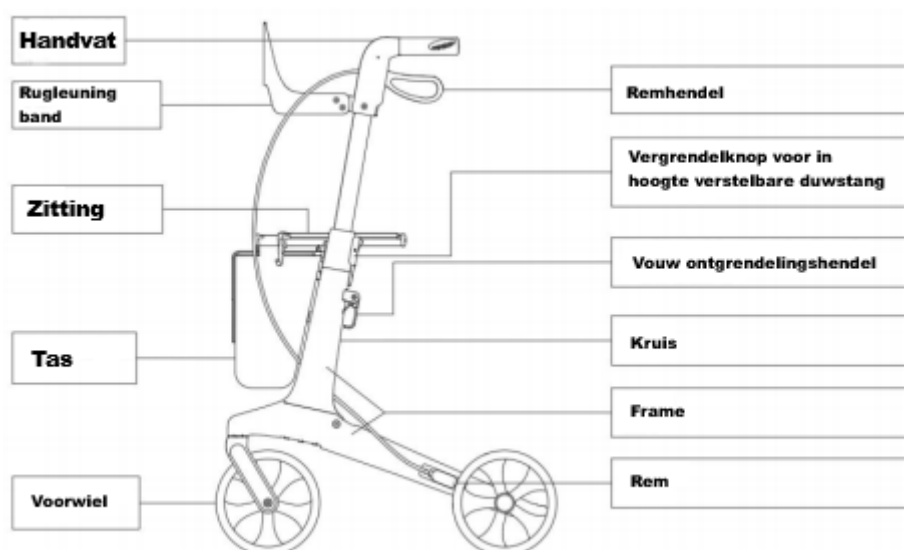

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

Rollator ROHERA

Gebruik

Aan de hand van de bovenstaande afbeelding zou het apparaat intuïtief gebruiksklaar moeten zijn. We raden u echter aan de onderstaande stappen te volgen:

Eerste controle

-Haal het apparaat eerst uit de doos en controleer (aan de hand van de bovenstaande afbeelding) of er niets ontbreekt. Als u in dit stadium constateert dat er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, ga dan niet verder met de montage. Neem direct contact op met uw leverancier.

Complete verpakking incl.:



Montage rugleuning



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rollator ROHERA



1. Pak de handgrepen met beide handen vast en til ze omhoog tot een rechtopstaande positie. Zorg ervoor dat het vouwslot volledig vergrendeld is;
2. Pak de handgreep met beide handen vast en trek deze naar beide kanten uit elkaar;
3. Druk op de steunbuizen van het zitkussen aan beide zijden totdat u het geluid van het "Gada"-mechanisme hoort. Het vergrendelingsmechanisme klikt vast.
 - Na het uitklappen of in elkaar zetten van de rollator moet u er altijd voor zorgen dat de zitsteun en de vouwvergrendeling van het frame goed vastzitten en dat het frame niet meer beweegt.
 - Zorg er altijd voor dat beide duwstangbuizen goed vastzitten in de hoofdsteunbuis met de vergrendelingsknop voor de in hoogte verstelbare duwstang om te voorkomen dat de duwstangbuizen per ongeluk naar binnen schuiven wanneer er kracht op wordt uitgeoefend.
 - Controleer altijd of de accessoires goed en veilig vastzitten VOORDAT u de rollator gebruikt.
 - Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot persoonlijk letsel.

Het inklappen van de rollator



1. Stel de steunstangen aan beide zijden in op de laagste stand;
2. Trek aan de vouwvergrendelingsriem in het midden van het zitkussen totdat de linker- en rechterframes volledig zijn ingeklapt;
3. Zet de stoelsteunbuizen aan beide zijden vast met de autogordel.
4. Als dubbel inklappen nodig is, trek dan met beide handen aan de ontgrendelingshendel van het tweede inklapmechanisme en druk tegelijkertijd het steunframe naar achteren.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

Rollator ROHERA

De hoogte van de duwstangen aanpassen




- Beide duwstangen moeten op dezelfde hoogte worden afgesteld.
- De correct afgestelde stangen moeten zich op heuphoogte van de gebruiker bevinden.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter zonder de remmen ingeschakeld.



De handrem gebruiken


1. Om de roller te stoppen, trekt u de remhendels omhoog richting de handgrepen.
2. Om stil te staan, houdt u de remhendels in de onderste stand.
3. Om te beginnen met rijden, laat u de remhendels los. Ze zakken automatisch naar beneden en de remmen worden losgelaten.

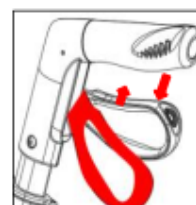

- U dient altijd de remmen te gebruiken wanneer u het apparaat niet verplaatst.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als er iemand op zit!
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter op een helling!
- Zit altijd rechtop op de rollator met uw onderarmen of handen lichtjes op de duwstangen.
- Leun nooit achterover op de rollator.

De handrem vergrendelen/ontgrendelen

1. Om de remmen te vergrendelen, duw je de remhendels naar beneden tot je een klik hoort.
2. Om de remmen te ontgrendelen, trek je de remhendels omhoog tot je voelt dat ze loskomen.

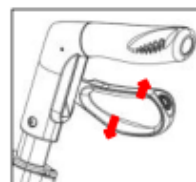

Bij gebruik van de rollator in een stilstaande positie moeten de handremmen **ALTIJD** vergrendeld zijn.

Reiniging

Algemeen:

- Reinig het apparaat regelmatig en houd het schoon.
- Licht vuil en stof kunnen worden verwijderd met een vochtige doek.
- Grotere vuildeeltjes kunnen worden verwijderd met een mild, niet-corroderend reinigingsmiddel en warm water.
- Gebruik geen schurende middelen of reinigingsmiddelen op basis van bleekmiddel, aangezien dit schade of verkleuring kan veroorzaken.
- Droog de onderdelen af met een zachte doek.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing


Rollator ROHERA

Wielen:

- Reinig de wielen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Droog ze af met een schone doek.
- Smeer de wielen periodiek of als ze beginnen te piepen in met multifunctionele olie.

Label

Het productlabel is aangebracht op een van de onderste buizen van het frame. Het bevat belangrijke informatie over het product: naam, serienummer, productiedatum, artikelnummer, maximaal gebruikersgewicht, product, breedte en fabrikantgegevens. Het label mag nooit van het apparaat worden verwijderd.

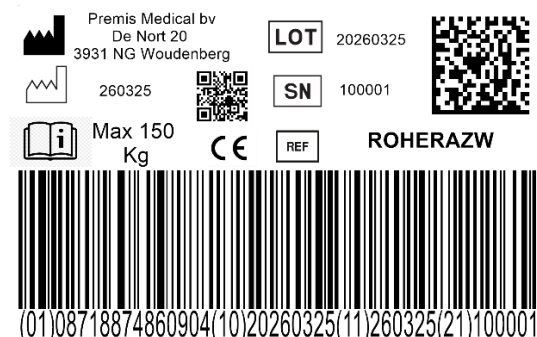

Technische gegevens	
Belangrijkste technische informatie	Technische gegevens
Max. belasting	150 kg
Max. belasting van de tas	5 kg
Totaalgewicht zonder boodschappentas	5,9 kg
Boodschappentas	0,37 kg
Lengte	65 cm
Totale hoogte ingeklapt (laagste stand)	82,5 cm (enkel ingeklapt) 35 cm (dubbel ingeklapt)
Breedte	64 cm
Ingeklapt	22 cm
Zitbreedte	47 cm
Hoogte handgrepen	76 – 98 cm
Zithoogte	61 cm
Remmen	2 x manoeuvreerremmen met parkeerfunctie
Wielen (diameter x breedte)	Voor: 200 x 36 mm – Zwarte PA+15%GF+TPR SOFT-band Achter: 200 x 36 mm – Zwarte PA+15%GF+TPR SOFT-band

Transportinstructies

De rollator is een gemakkelijk opvouwbaar product, handig voor transport. Indien transport noodzakelijk is, raden wij aan de rollator op te vouwen zoals beschreven in de bovenstaande instructies. De rollator dient stabiel te worden vervoerd, zodat er geen risico is op plotselinge en gevaarlijke bewegingen van het vervoerde apparaat.

Onderhoud

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de rollator ALTIJD goed vastzitten.
- Controleer of alle schroeven goed vastzitten. Draai ze indien nodig aan.
- Vervang kapotte, beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk.

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rollator ROHERA

Pagina **8 van 10**

Doc.nr. **G.1.1.4.12
ROHERA**

Procedure-
verantwoordelijke **Directie**

Revisiedatum **01-05-2026**

Hergebruik

De rollator is geschikt voor hergebruik. Voordat u deze aan een andere gebruiker doorgeeft, moet deze worden gecontroleerd door een specialist.

De volgende punten moeten worden gecontroleerd:

- Visuele inspectie van het frame
- Goed vastzittende moeren en bouten
- Conditie van de kunststof onderdelen
- Conditie van de wielen en kogellagers
- Effectiviteit en conditie van de remmen
- Wanneer een van de onderdelen beschadigd of kapot is, moet het worden vervangen door een nieuw onderdeel. Het wordt aanbevolen om de wielen te vervangen bij elke vervanging. Alle losse bouten en moeren moeten worden vastgedraaid. Het product moet grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd vóór hergebruik.









WAARSCHUWING! Het is verboden de rollator opnieuw te gebruiken als het frame verbogen of gebroken is.

Garantieregeling:

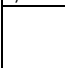De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - c. Op de rollator zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer(☒) en de productiedatum (☒). **VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het product bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf. De garantieperiode voor de wielen is 1 jaar.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rollator ROHERA

Foutopsporing:




Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
De wielen rollen niet meer	De lagers zijn versleten	Lagers vervangen
De handvaten verdraaien of komen los	De handvaten zijn uitgerekt of versleten	De handvaten vastlijmen met contactlijm of vervangen
Één van de wielen zweeft	<ol style="list-style-type: none"> De rollator is niet goed uitgekapt OF Het frame is scheef 	<ol style="list-style-type: none"> De rollator volledig uitklappen OF Het frame laten repareren
Het in- en uitklappen van de nieuwe rollator gaat stroef	De rollator is nog niet ingelopen.	De rollator meermaals achter elkaar uit- en inklappen tot het versoepelt.
Ik krijg last van mijn handen/armen/schouders bij het lopen	<ol style="list-style-type: none"> De hoogte is verkeerd afgesteld OF U heeft last van trillingen door oneffen ondergronden 	<ol style="list-style-type: none"> De hoogte van de handgrepen juist afstellen OF De PU banden vervangen OF Vermijd oneffen ondergronden
De remmen remmen niet voldoende	<ol style="list-style-type: none"> Het remschoentje is versleten OF De remmen zijn verkeerd afgesteld 	<ol style="list-style-type: none"> Het remschoentje vervangen OF De remmen juist afstellen
De remkabels blijven haken aan deuren etc.	De remkabelgeleiders zijn losgekomen	De remkabelgeleiders vervangen

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

- Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
- Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

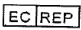 Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands
 



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Rollator ROHERA

Pagina	10 van 10
Doc.nr.	G.1.1.4.12 ROHERA
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	01-05-2026

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745
 NEN: EN:IEC 62366-1:2015
 NEN: EN:ISO 15223-1:2016
 NEN: EN:ISO 14971-1:2015
 CEN: NL:1985:1998
 NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	01-05-2026	Auteur:	R.Keuning